

Produktbeschreibung:

Impression Tray Resin LC sind opake bzw. transparente lichthärtende Kunststoffe als vorgeformte Oberkiefer- und Unterkieferplatten für die Anfertigung individueller Abform- und Funktionslöffel in der Kronen-, Brücken- und Totalprothetik, für die Erarbeitung von Basen für Bisschablonen und zur Anfertigung von Bissregistraten. Sie sind gebrauchsfertig und ohne Geruchsbelästigung leicht zu handhaben.

Impression Tray Resin LC sind bei Raum- und Tageslicht lange verarbeitbar und härtet unter Halogen oder UV-Licht schnell aus.

Die individuellen Löffel sind direkt nach der Herstellung verwendbar.

Impression Tray Resin LC besitzen ein angenehmes Pfefferminzaroma.

Art der Anwendung:

Impression Tray Resin LC rechtzeitig vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen. Auf dem Gipsmodell wird der Randverlauf für den individuellen Löffel eingezeichnet. Falls nötig, Platzhalter aufbringen. Werden keine Platzhalter benötigt, sollte das Gipsmodell isoliert werden. Schutzfolie abziehen und Platte auf das Modell aufbringen, formen und an den Rändern, wie eingezeichnet, beschneiden. Die Durchsichtigkeit von transparenten Impression Tray Resin LC erlaubt ein sehr genaues Formen. Der Griff lässt sich leicht aus dem Materialüberschuss gestalten.

Impression Tray Resin LC werden auf dem Modell in einem üblichen Lichtgerät (Halogen- oder UV-Licht) polymerisiert. Je nach Dicke des geformten Löffels 3 - 5 min von der Rückseite belichten.

Längere Polymerisationszeit verbessert die physikalischen Eigenschaften des Materials.

Gegebenenfalls ist die Belichtungszeit daher zu verlängern.

Der so angefertigte Abformlöffel ist sofort gebrauchsfertig bzw. kann sofort bearbeitet werden. Eine möglicherweise durch Luft-Sauerstoff auftretende geringe Inhibitionsschicht kann durch Abwischen, mit einem mit Alkohol befeuchteten Tuch entfernt werden.

Lagerung:

Lagerung von 4°C - 23°C. Kühl und lichtgeschützt lagern!

Vorsichtsmaßnahmen/Hinweise:

Zu kurze oder zu geringe Intensität beim Belichten führt zu Festigkeitsverlusten.

Impression Tray Resin LC enthalten Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, Pfefferminzöl, BHT. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von Impression Tray Resin LC ist auf die Anwendung zu verzichten.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Unsere Präparate werden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt. Soweit es die Anwendung der von uns gelieferten Präparate betrifft, sind unsere wörtlichen und/ oder schriftlichen Hinweise bzw. unsere Beratung nach bestem Wissen abgegeben und unverbindlich. Unsere Hinweise und/ oder Beratung befreien Sie nicht davon, die von uns gelieferten Präparate auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke zu prüfen. Da die Anwendung unserer Präparate ohne unsere Kontrolle erfolgt, liegt sie ausschließlich in Ihrer eigenen Verantwortung. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Präparate entsprechend bestehender Normen sowie entsprechend des in unseren allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen festgelegten Standards.