




SOOO KOMFORTABEL  
IST **IDENTIUM**<sup>®</sup>

PRÄZISIONSABFORMUNG

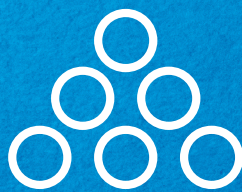

**KETTENBACHDENTAL**

Simply intelligent

# IDENTIUM® – DIE EINZIGARTIGE MATERIALKOMBINATION!

# KOMFORTABEL UND PRÄZISE ABFORMEN

## Präzisionsabformmaterial einer neuen Generation

Vereint die Vorzüge zweier bewährter Abformmaterialien (A-Silikon und Polyether) – Vinylsiloxanether®.




### EINZEITIGE ABFORMUNG

- Monophasenabformung
- Doppelmischabformung




### INDIKATIONEN

- Kronen und Brücken
- Implantate
- Inlays/Onlays
- Kombinierte Versorgungen (Fixationsabformung)
- Überabformung
- Funktionsabformung

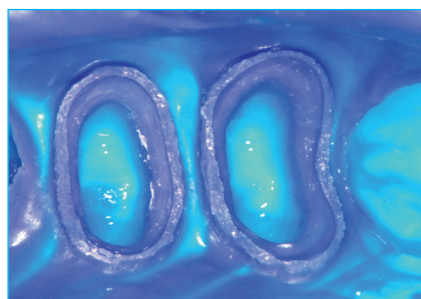

Doppelmischabformung

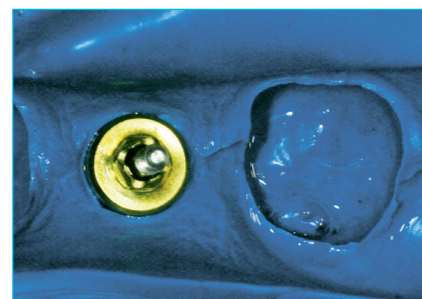

Implantatabformung



LEICHTE MUNDENTNAHME

KURZE MUNDVERWEILDAUER

HERVORRAGENDE FLIESSFÄHIGKEIT

Erhältlich in den Viskositäten **Heavy, Medium und Light**



Wählbar in den Abbindeggeschwindigkeiten **regular** (4:30 Min.) und **fast** (3:30 Min.)




Kompatibel mit allen gängigen **Anmischgeräten**



# IDENTIUM® – KOMFORTABEL IN ALLEN DIMENSIONEN

## Federleichte Mundentnahme


2,6-fach geringere Abzugskräfte **Identium®** vs. Impregum™

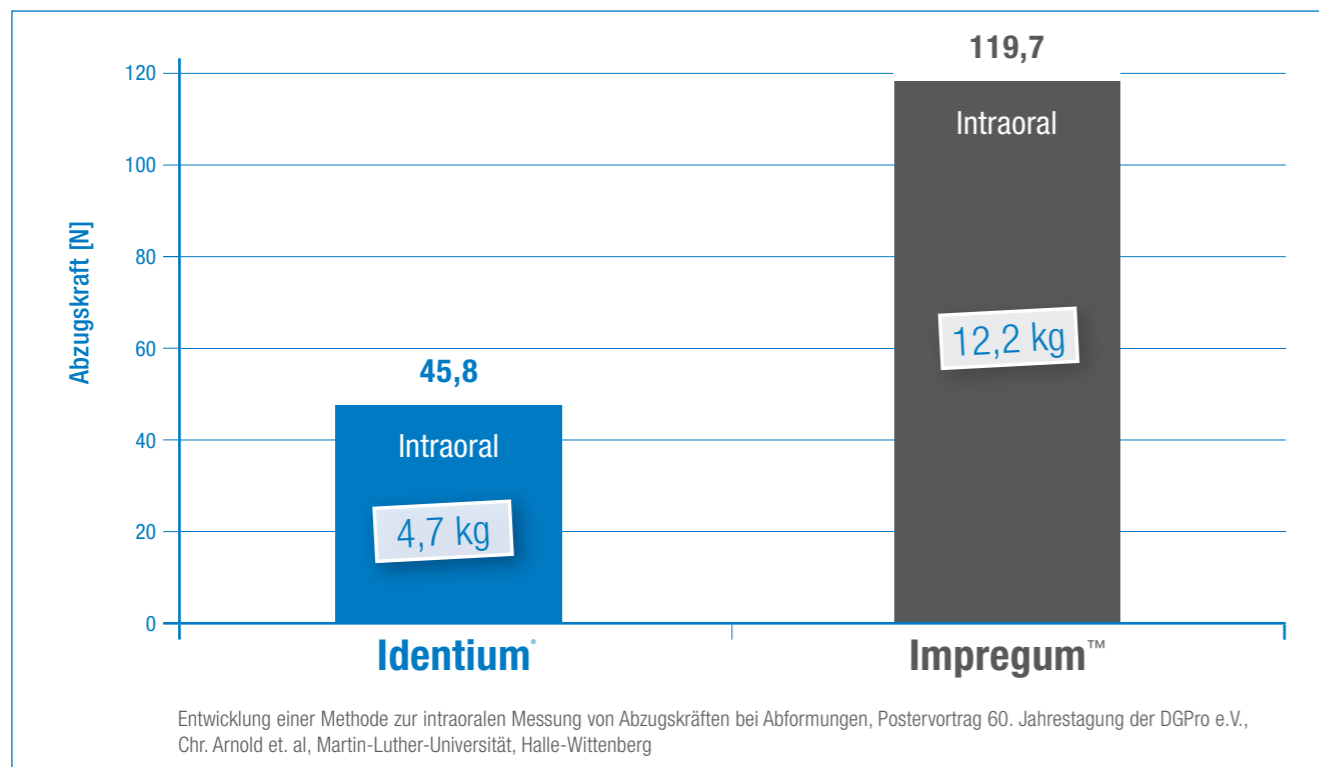

Mit der Mundentnahme ohne Kraftaufwand vermeiden Sie Verformungen und Irritationen.  
**Für Ihre Präzision.**

## Schnelles Abbindeende

bei ausreichender Verarbeitungszeit und kurzer Mundverweildauer

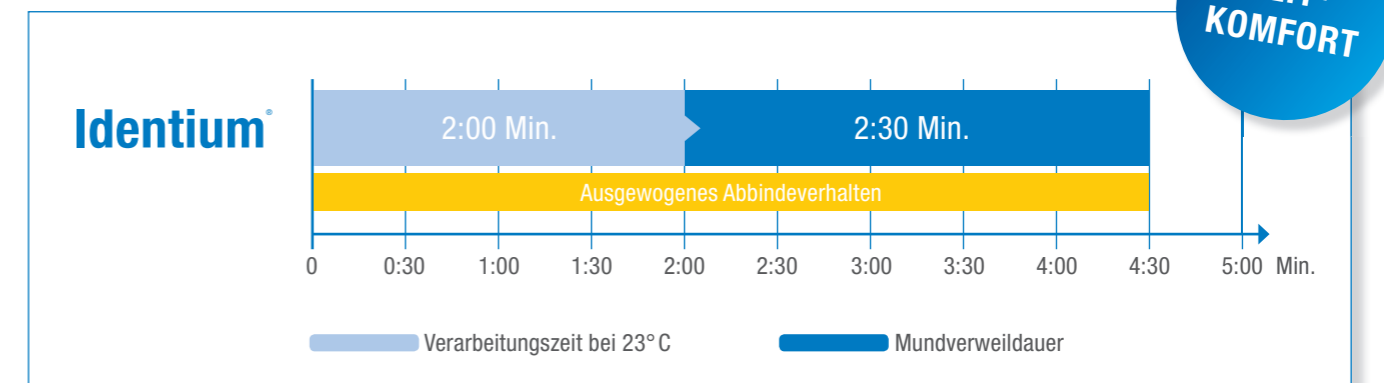

Die ausreichende Verarbeitungszeit lässt Sie ruhig arbeiten.  
**Für Ihre Präzision.**

## Hervorragende Fließfähigkeit



Mit hervorragender Fließfähigkeit bilden Sie auch engste Spalträume detailgetreu ab.  
**Für Ihre Präzision.**



**Vorteile, die auch bei  
Ihren Patienten gut  
ankommen.**

- Geruchs- und geschmacksneutrales Material reduziert den Würge- und Brechreiz
- Schnelles Abbinden und leichte Mundentnahme für ein entspanntes und angenehmes Gefühl
- Thixotrope Fließfähigkeit vermeidet Spuren auf Haut und Kleidung

# IDENTIUM® – DAS SORTIMENT

## Identium®

### Identium® Heavy

### Identium® Heavy Fast

#### Intro pack

380-ml-Kartusche, 50-ml-Kartusche Identium® Light, 10 ml Adhesive,  
10 Dynamische Mischer, 6 Mischkanülen gelb, 6 Intraoral tips gelb

#### Refill pack

2 x 380-ml-Kartusche

### Identium® Medium

### Identium® Medium Fast

#### Intro pack

380-ml-Kartusche, 10 ml Adhesive,  
10 Dynamische Mischer, 1 Applikationsspritze

#### Refill pack

2 x 380-ml-Kartusche

### Identium® Light

### Identium® Light Fast

#### Normal pack

2 x 50-ml-Kartusche, 8 Mischkanülen gelb



Kettenbach GmbH & Co. KG  
Im Heerfeld 7  
35713 Eschenburg · Germany  
Telefon +49 (0)2774 7050  
info@kettenbach.com  
www.kettenbach-dental.de

012735\_0819

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent