



### Allgemeine Tipps für Ihren Erfolg

- Immer Handschuhe anlegen; Kofferdam wird empfohlen
- Immer Silikonschutzhülle übers Winkelstück bei simultaner Längenkontrolle
- Immer Lippenclip auf gegenüberliegender Wangenseite des zu behandelnden Zahnes einhängen
- Immer Zugangskavität vollständig mit Luftpuster oder Wattepellet trocknen
- Separate Längenbestimmung: passende (leicht wandständige) Handfeile verwenden
- Erst initial Länge über Handfeile bestimmen, dann simultan Länge übers Winkelstück während der Aufbereitung kontrollieren

#### 1. Aktivierung des Apexlokators




Lippenclip auf Mikromotor legen  
Displaymeldung: Apexlokator EIN


#### 2. Separate Längenbestimmung



Handfeile in Feilenklemme und Lippenclip  
in Wangentasche des Patienten

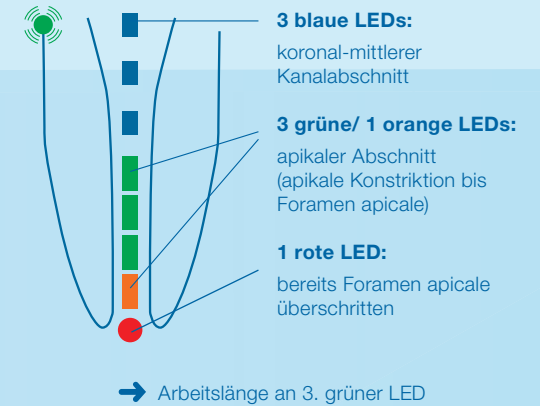


#### 3. Simultane Längenkontrolle

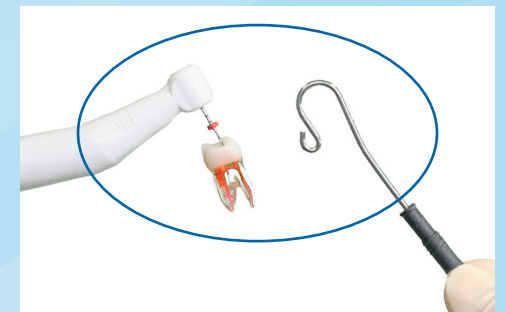

Maschinelle Feile ins Winkelstück und  
Lippenclip in Wangentasche des Patienten

#### 4. Option: Zuschaltung des Auto-APEX-STOPP unter MENÜ

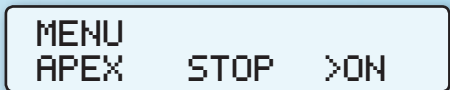

### 1. Ölpflege des 6:1 Winkelstücks mit Druckluft

①

②

③

④

⑤

⑥

LUFT 5 Sek.

Öl 1 Sek.

KALIBRIERUNG

RECIPROCATION  
RECIPROC ALL

### 2. Oberflächendesinfektion

① ✓ Aldehydfreie Lösung

② ✓

Display bitte **NICHT** direkt besprühen!

### 3. Akkuladung

✓ Akkuanzeige rot: Laden

Ladezeit ca. 3 Stunden

Beim Ladevorgang beachten:

- Akkuanzeige wechselt bereits nach **ca. 30 Minuten** von rot auf grün.
- Dies bedeutet aber nur ca. 20% „Nachladung“
- Den Ladevorgang noch nicht abbrechen, sondern volle 3 Stunden laden.

Nach Ladung ist Dauerbetrieb von 2 Stunden möglich

Akkuanzeige grün, **NOCH NICHT** laden