

Endo it your way!

Finden Sie den
VDW Endomotor,
der zu Ihnen
passt.



VDW.GOLD®RECIPROC®

mit integriertem Apexlokator

Ein praxiserprobtes Gerät, auf das Sie sich verlassen können!

Sicherheitsfunktionen
für eine reibungslose
und erfolgreiche
Aufbereitung




Besonders leistungsstark für die rotierende und reziproke Wurzelkanalaufbereitung

- Wirkungsvolle und zugleich sichere Aufbereitung in rotierender und reziproker Bewegung mit Drehmomentregulierung
- Unterstützt eine umfangreiche Auswahl an rotierenden und reziproken Feilensystemen
- Dr's Choice: Speichern von bis zu 15 individuellen Drehmoment- und Drehzahleinstellungen
- Akkubetriebener Motor; ermöglicht das Arbeiten während des Ladevorgangs

Effektive Aufbereitung und präzise Längenbestimmung mit einem Gerät

Wählen Sie zwischen drei Betriebsmodi:

1. Überwachen Sie den Feilenvorschub simultan während der Aufbereitung.
2. Bereiten Sie den Wurzelkanal ohne Längenbestimmung auf.
3. Bestimmen Sie die Arbeitslänge oder überwachen Sie den Feilenvorschub unabhängig von der Aufbereitung.

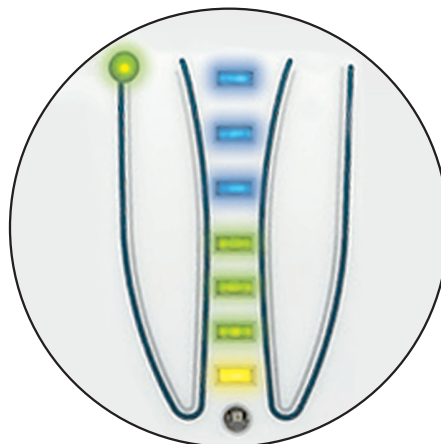

DIE GOLDENE ERFOLGSGESCHICHTE

Im Jahr 2007 forderte VDW mit der Einführung von VDW.GOLD®, dem ersten Endomotor mit integriertem Apexlokator, die etablierten Endo-Standards heraus. Mit der Neuauflage VDW.GOLD®RECIPROC® in 2011 wurde der Anwendungsbereich um die innovative Aufbereitungsmethode RECIPROC® erweitert. Heute ist der GOLD-Motor einer der meistverkauften Endomotoren auf dem Markt. Von Anfang an spiegelt er die reine Endoexpertise von VDW und das Erbe deutscher Ingenieurskunst wider. Kontinuierliche Verbesserungen machen ihn zu einem der zuverlässigsten Endomotoren, ausgestattet mit einer außerordentlichen 3-Jahres-Garantie. Ein großartiger Erfolg, den VDW mit Tausenden von VDW.GOLD®-Anwendern auf der ganzen Welt teilt.



VDW.SILVER® RECIPROC®

Endomotor

Leistungsstarker Motor für die effektive und sichere Wurzelkanalaufbereitung

- Große Auswahl an reziproken und rotierenden Feilensystemen
- Dr's Choice: Speichern von bis zu 15 individuellen Drehmoment- und Drehzahleinstellungen
- ASR*: automatischer Rückwärtslauf bei Erreichen der Drehmomentgrenze
- RECIPROC REVERSE Komfortfunktion**: Der 2-Stufen-Indikator signalisiert eine erhöhte Belastung auf das Instrument.
- Akkubetriebener Motor; ermöglicht das Arbeiten während des Ladevorgangs

*nur im rotierenden Modus **nur im RECIPROC®-Modus



VDW.SILVER® RECIPROC® &
RAYPEX® 6

RAYPEX® 6

Apexlokator

Längenbestimmung mit nutzerfreundlichem Interface

- Klare akustische und visuelle Signale auf einem hellen Farb-Touchscreen
- Vielfältige Sicherheitsfunktionen, die das Vertrauen von Anwender und Patient stärken
- Demomodus für eine einfache und verständliche Patientenaufklärung
- Intuitive Bedienung, handliches Design im Taschenformat, klappbar
- Langlebige, wiederaufladbare Batterie

Ein starkes Duo
für professionelle
Endo-Behandlungen



RECIPROC® direct

Das erste reziproke Winkelstück
Die einfachste Art, mit RECIPROC® zu starten

- Schneller und kostengünstiger Einstieg in die zeitsparendste Aufbereitungstechnik
- Einfach auf Ihren Elektro- oder Druckluftmotor* klicken
- Treibt RECIPROC® Instrumente sicher und effizient an
- Das ideale Zubehör zu Ihrer Dentaleinheit für den einfachen Wechsel von manueller zu maschineller Aufbereitung

* ISO-E-Kupplung nach ISO 3964 erforderlich

Einfach und pragmatisch:
So wird die Dentaleinheit
zur Endo-Einheit!



Meine Wahl?
Plug'n'play!



Finden Sie den VDW Endomotor, der zu Ihnen passt!

		VDW.GOLD® RECIPROC®	VDW.SILVER® RECIPROC®	RECIPROC® direct
Feilen-Bibliothek mit spezifischen Voreinstellungen reziproker und rotierender NiTi-Systeme				
Reziproke Systeme	RECIPROC®, RECIPROC® <i>blue</i> , R-PILOT™	✓	✓	✓
	WaveOne®, WaveOne® Gold, WaveOne® Gold Glider	✓	✓	✗
Rotierende Systeme	VDW.ROTATE™, VDW.ROTATE™ Retreatment, Mtwo®, Mtwo® Retreatment, FlexMaster®, ProTaper®, ProTaper Next®, ProTaper® Universal, ProTaper® Retreatment, ProGlider®	✓	✓	✗
	K3™, Gates	✓	✓	✗
	ProFile®, GT® Series X, Hero®, RaCe, FlexMaster® Retreatment, Lentulo	✓	✗	✗
Programmierbare Drehmoment und Drehzahleinstellungen		✓	✓	–
Individuell programmierbare Feilensequenzen		✗	✗	–
Spezielle Sicherheitsfunktionen (im rotierenden Modus)	ASR: Automatischer Stopp und Rückwärtslauf bei Erreichen der Drehmomentgrenze	✓	✓	✗
	ANA (Anatomie): Programm zur Reduktion der Drehmomentgrenze bei schwieriger Kanal Anatomie	✓	✗	✗
RECIPROC REVERSE Komfortfunktion 2-Stufen-Indikator zur Unterstützung bei der richtigen Aufbereitung (im RECIPROC® Modus)		✓	✓	✗
Software-Update möglich		✓	✓	–
Unabhängiger Akkubetrieb		✓	✓	–
Menü Individuell anpassbares Display: Nicht eingesetzte Feilensysteme können zum vereinfachten Arbeiten ausgeblendet werden		✓	✗	–
Apexlokator • Wahl zwischen simultaner Längenkontrolle während der Aufbereitung und separater Längenbestimmung • Automatischer Apex-Stopp bei reziproker und rotierender Aufbereitung		✓	✗	✗
6:1 Winkelstück		✓	✓	–



Für eine Endo-Behandlung in original reziproker Bewegung empfiehlt VDW die Nutzung von RECIPROC®, RECIPROC® *blue* und R-PILOT™ Feilen zusammen mit den VDW Motoren VDW.GOLD®RECIPROC®, VDW.SILVER®RECIPROC® und RECIPROC® direct.

WaveOne®, ProTaper®, ProTaper Next®, ProGlider® und GT® sind eingetragene Marken von Dentsply Sirona. K3™ ist eine Marke der KAVO KERR GROUP. Hero® ist eine eingetragene Marke von Micro Mega.

Füreinander
geschaffen

■ VDW.GOLD®RECIPROC®

VDW.GOLD®RECIPROC® _____ V04 1173 000 000

- Inkl. 6:1 Winkelstück

VDW.GOLD®RECIPROC® + RECIPROC® System Kit _____ V04 1173 025 611

- 12 RECIPROC® Instrumente (25 mm), steril, 6 × R25, 3 × R40, 3 × R50
- 144 RECIPROC® Papierspitzen, sortiert, steril, 96 × R25, 24 × R40, 24 × R50
- 60 RECIPROC® Guttapercha Stifte, sortiert, 40 × R25, 10 × R40, 10 × R50
- Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

VDW.GOLD®RECIPROC® blue 24 _____ V04 1173 025 624

- VDW.GOLD®RECIPROC®
- RECIPROC® blue System Kit 24:
 - 24 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm), steril, 12 × R25, 6 × R40, 6 × R50
 - 180 RECIPROC® blue Papierspitzen, sortiert, steril, 60 × R25, 60 × R40, 60 × R50
 - 60 RECIPROC® blue Guttapercha Stifte, sortiert, 36 × R25, 12 × R40, 12 × R50
 - 1 Endo-Übungszahn, trepaniert
 - Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

■ VDW.SILVER®RECIPROC®

VDW.SILVER®RECIPROC® _____ V04 1163 000 000

- Inkl. 6:1 Winkelstück

VDW.SILVER®RECIPROC® + RECIPROC® System Kit _____ V04 1163 025 611

- 12 RECIPROC® Instrumente (25 mm), steril, 6 × R25, 3 × R40, 3 × R50
- 144 RECIPROC® Papierspitzen, sortiert, steril, 96 × R25, 24 × R40, 24 × R50
- 60 RECIPROC® Guttapercha Stifte, sortiert, 40 × R25, 10 × R40, 10 × R50
- 1 Endo-Übungszahn, trepaniert
- Anwenderkarte, Broschüre, Gebrauchsanweisung

■ Zubehör für VDW.GOLD®RECIPROC® und VDW.SILVER®RECIPROC®

6:1 Winkelstück _____ V04 1079 000 000

Winkelstück-Einmalhüllen, 5 Stück _____ V04 1107 000 512

Lippenclip, 5 Stück _____ V04 1107 000 514

Feilenklemme, 2 Stück _____ V04 1107 000 515

Lippenclipkabel mit Ferritring _____ V04 1177 000 516

Feilenklemmkabel _____ V04 1107 000 519

Netzteil _____ V04 1107 000 517

Fußschalter _____ V04 1107 000 510

■ RECIPROC® direct

RECIPROC® direct blue _____ V04 1095 025 000

- 1 RECIPROC® direct Winkelstück
- 24 RECIPROC® blue Instrumente (25 mm), steril, 12 × R25, 6 × R40, 6 × R50
- 1 Sprayadapter für manuelle Ölpflege
- Gebrauchsanweisung, Anwenderkarte

■ RAYPEX®6

RAYPEX®6 _____ V04 1113 000 000

- Inkl. Zubehör

■ Weiterhin erhältlich: Zubehör für VDW.CONNECT Drive®

VDW.CONNECT Drive® Handstück ohne Winkelstück _____ V04 1185 000 502

6:1 Winkelstück _____ V04 1185 000 504

Handstück-Einmalhüllen, 100 Stück _____ V04 1185 000 503

Netzteil _____ V04 1185 000 501

Sprayadapter für manuelle Ölpflege _____ V04 1185 000 506

Winkelstück-Aufsatz für Assistina _____ V04 1185 000 511

(geeignet für W&H REF 06037100)

■ Zubehör für iPad®

VDW.CONNECT iPad® Halterung _____ M00 C000 STA 000

Einweg-Schutzhüllen für iPad mini® 4, 100 Stück _____ M00 C000 079 BAR

Einweg-Schutzhüllen für iPad® 9,7", 100 Stück _____ M00 C000 097 BAR

Einweg-Schutzhüllen für iPad® 10,5", 100 Stück _____ M00 C000 105 BAR

Einweg-Schutzhüllen für iPad® 12,9", 100 Stück _____ M00 C000 129 BAR



Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren bevorzugten Händler
oder besuchen Sie uns auf www.vdw-dental.com.

 **VDW GmbH**
Bayerwaldstr. 15
81737 München
Tel +49 (0) 89 62734-0
Fax +49 (0) 89 62734-304
info@vdw-dental.com


0123