



Vertrieb/distribution:
KaVo Dental GmbH
 Bismarckring 39
 D-88400 Biberach

Hersteller/manufacturer:
Kaltenbach & Voigt GmbH
 Bismarckring 39
 D-88400 Biberach

de

MULTiflex LUX
Kupplung 465 LRN
 Mat.-Nr. 0.553.1550

GEBRAUCHSANWEISUNG
 0.589.0951 - 01.06 - 11

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,
 KaVo wünscht Ihnen mit Ihrem neuen Qualitätsprodukt
 MULTiflex LUX Kupplung 465 LRN
 viel Freude. Damit Sie störungsfrei, wirtschaftlich und sicher arbeiten können, beachten Sie bitte
 nachstehende Hinweise:



Technische Daten

MULTiflex LUX Kupplung 465 LRN
 KaVo 4-Loch-Anschluß mit Kontaktstiften.
 Sprayregulierung durch Drehring.
 mit Rücksaugstopp.

Betriebsspannung der Lampe
 Leistung der Lampe

max. 3,3 VDC
max. 2,5 Watt



Wichtige Hinweise

Die MULTiflex LUX Kupplung ist nur für die zahnärztliche Behandlung im Bereich der Zahnheilkunde bestimmt, jede Art der Zweckentfremdung oder Änderung am Produkt ist nicht erlaubt und kann zu einer Gefährdung führen.

Die MULTiflex LUX Kupplung ist nur für die beschriebene Anwendung, unter Beachtung

- der geltenden Arbeitsschutzbestimmungen,
- der geltenden Unfallverhütungsmaßnahmen,
- und dieser Gebrauchsanweisung vom fachkundigen Anwender zu benutzen.


Es ist die Pflicht des Anwenders,

- nur fehlerfreie Arbeitsmittel zu benutzen,
- auf den richtigen Verwendungszweck zu achten,
- sich, den Patienten und Dritte vor Gefahren zu schützen.

Inbetriebnahme

Anschluß an Schlauch

- !** Es ist generell für trockene, saubere und nicht kontaminierte Druckluft gemäß EN ISO 7494 - 2 zu sorgen. Verschmutzte und feuchte Druckluft führt zu vorzeitigem Lagerverschleiß.

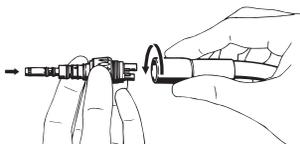

MULTiflex LUX Kupplung an den Turbinenschlauch stecken und mit der Überwurfmutter vom Schlauch fest anziehen. Danach mit beigelegtem Schlüssel fest anziehen. Mit KAVOSpray die O-Ringe leicht einsprühen. Die Kupplung bleibt am Schlauch angeschraubt. Bei einer eventuellen Abnahme Schlüssel verwenden.

- !** Nicht am Drehring festhalten, da sonst Funktionsstörungen auftreten können.

Wechseln der LUX Instrumente

Aufsetzbar sind alle KaVo LUX Instrumente mit Original MULTiflex Anschluß.

MULTiflex Instrument exakt auf die MULTiflex LUX Kupplung aufstecken und nach hinten drücken bis es hörbar einrastet.


- !** Nicht exaktes Kuppeln vermindert die Lebensdauer der Lampe.




Sprayregulierung

Durch Drehen des Sprayringes im Uhrzeigersinn kann die Wassermenge durch verschiedene Raststellungen reduziert werden.

- !** Zur Erhöhung der Wassermenge Drehring gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

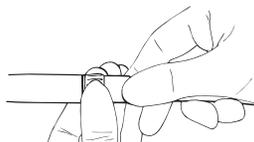

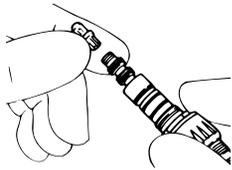


Beheben von Störungen

Austauschen der Lampe

Schraubkappe linksdrehend abschrauben.
Lampe aus der Fassung herausnehmen.
Neue Lampe vorsichtig einsetzen.

⚠ Auf die Kontakte in der Kupplung achten. Schraubkappe aufschrauben.

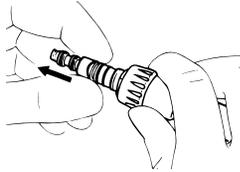

Austauschen der O-Ringe

Tritt eine Undichtigkeit an der Kupplung auf,
O-Ringe austauschen.
O-Ringe zwischen zwei Fingern auf die Seite
schieben, bis eine Schlaufe entsteht.
O-Ringe nach vorne schieben und abnehmen.
Neue O-Ringe in die Einstiche einsetzen und
mit KAVOSpray einsprühen.

⚠ Keine Vaseline oder anderes Fett verwenden.

Pflegeanweisung

Äußere Reinigung

Die MULTiflex LUX Kupplung mit einer
Alkohollösung äußerlich reinigen.

⚠ Die MULTiflex LUX Kupplung nicht in Ultraschall Reinigungsgeräte legen, da sonst Funktionsstörungen auftreten können.



Desinfektion

Die MULTiflex LUX Kupplung ist äußerlich
desinfizierbar mit chemischen Desinfektions-
mitteln (Sprüh-, Wischdesinfektion).
MULTiflex LUX Kupplungen nicht in
Desinfektionsbäder legen oder tauchen.

⚠ Die MULTiflex LUX Kupplung darf nicht sterilisiert werden.



Zubehör

Lieferbar über den Dental-med. Fachhandel

| Bezeichnung | Mat.-Nr. |
|-----------------|------------|
| Schlüssel | 0.411.1563 |
| Ersatzdichtung | 0.553.5262 |
| Hochdruckklampe | 0.553.3881 |
| O-Ring | 1.004.2776 |
| O-Ring | 1.004.2775 |

Weitere Anwendungs- und Sicherheitshinweise

⚠ Vor längeren Nutzungspausen muß die MULTiflex LUX Kupplung nach Anweisung gereinigt, gepflegt und trocken gelagert werden. Bei Störungen darf nicht weitergearbeitet werden.

Wenden Sie sich deshalb zur Vermeidung größerer Schäden an den KaVo Customer Service Center Warthausen, an eine KaVo Niederlassung oder an Ihr zuständiges Dental-Depot.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH, D-88400 Biberach/Riss
Telefon +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488
Internet: www.kavo.com