


VISALYS® TEMP

1



Farbe auswählen, Kartusche einlegen, Verschluss entfernen, neuen Mischer aufsetzen.

2

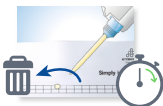

Vor jedem Gebrauch etwas Material austragen und verwerfen, Stoppuhr starten.

3



Vom Boden aus befüllen, Spitze der Mischkanüle im Material belassen. Tipp: Erbsengroße Menge auf den Handrücken austragen (siehe Schritt 5).

4



max. 40 Sek.

Innerhalb von 40 Sek. nach Mischbeginn mit leichtem Druck in den Patientemund einsetzen.

5



1:30 – 2:30 Min.

Aushärtegrad intraoral prüfen (oder an der Probe auf der Hand, siehe Schritt 3). Das Provisorium zwischen 1:30 Min. und 2:30 Min. nach Mischbeginn entnehmen.

6



4:00 Min.

Ausarbeitung von Visalys® Temp ab ca. 4 Min. nach Mischbeginn.

00:00 Min.

00:40 Min.

01:30 Min.

02:30 Min.

04:00 Min.

Verarbeitungszeit

Mundverweildauer

Mundentnahme

Aushärtezeit

Ausarbeitung


VISALYS® TEMP

1



Select shade, insert cartridge, remove cap, attach new mixing tip.

2

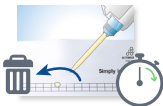

Before each use, extrude and discard a little material, start a stopwatch.

3



Fill from the base upwards, keep the end of the mixing tip in the material. **Tip:** apply a pea-sized quantity of material to the back of the hand (see step 5).

4



Insert into the patient's mouth, applying slight pressure, within 40 sec. of starting the mixing.

5



Check the degree of hardness intraorally (or use the sample on your hand, see step 3). Remove the temporary restoration between 1:30 min. and 2:30 min. after the start of mixing.

6



Finish the Visalys® Temp about 4 min. after the start of mixing.

00:00 min.

00:40 min.

01:30 min.

02:30 min.

04:00 min.

Processing time

Dwell time in mouth

Removal from mouth

Curing time

Finishing