



Polieren ohne Paste? Ja – mit Diamanten.

Sof-Lex™-Polierräderset

Wie viel Zeit und Aufwand investieren Sie, um Ihren Patienten ein strahlendes Lächeln zu schenken? Ganz gleich ob Sie gummierte Polierinstrumente oder eine Diamant Polierpaste verwenden – dieser Arbeitsschritt kann dauern. Selbst mit größtem Aufwand wird der gewünschte Hochglanz oftmals nicht erreicht. Zwei innovative 3M Technologien helfen Ihnen zum Erfolg.

Füllungstherapie mit 3M™ ESPE™ Filtek™ Supreme XTE Universal Composite.

Zahnärzte verwenden unser Hochleistungs-Nanocomposite wegen der einzigartigen Ästhetik. Dank der einmaligen Nanotechnologie überzeugt das Material durch einfache und schnelle Polierbarkeit sowie unübertroffene Glanzbeständigkeit.

Polieren mit dem Sof-Lex™-Polierräderset.

Schluss mit der Polierpaste. Mit unserem Vorpolierrad aus Aluminiumoxid glätten Sie die Oberflächen und mit dem Diamantpolierrad erzielen Sie die finale Hochglanzpolitur. Die Rädchen passen sich dabei perfekt an jede Zahnoberfläche an. Darüber hinaus verändern sie nicht die Kontur der Restauration und sind schonend zur Gingiva*.

Ihre Patienten werden strahlen und Sie werden sich wundern, wie schnell und einfach es sein kann, natürliche und wunderschön glänzende Restaurationen zu erhalten.

*Im Vergleich zu anderen Polierinstrumenten.

In nur zwei Schritten zur Hochglanzpolitur.



3M™ ESPE™
Sof-Lex™-Vorpolierrad
(beige)

3M™ ESPE™
Sof-Lex™-Diamantpolierrad
(pink)

Ein Unterschied der sich sehen lassen kann!



Links: Filtek™ Supreme XTE Universal Composite poliert mit Sof-Lex™-Polierräderset

Rechts: Spectrum® TPH® 3 Feinstpartikel-Hybridkomposit poliert mit Enhance® Finier- und Poliersystem und PoGo® Einschritt Diamant Mikropolierer

Worin liegen die Vorteile?

- Hochglanzpolitur in nur zwei Schritten
- Passt sich jeder Zahnoberfläche perfekt an
- Schnell und einfach
- Wiederverwendbar durch vorheriges Sterilisieren
- Langlebiger Glanzehalt bei Verwendung von Filtek™ Supreme XTE Universal Composite

Würde es Ihnen nicht gefallen ein Produkt zu finden, welches unschlagbar in der Anwendung und zugleich wirtschaftlich ist?

Dann werden Sie es lieben! Die Sof-Lex™ Rädchen können sterilisiert und wieder verwendet werden, sie sind somit enorm wirtschaftlich und können einfach in den Praxisalltag integriert werden.

Da das komplette Polierädchen aus Diamantpartikeln besteht, lassen sich Restaurationsoberflächen aus jedem Winkel auf Hochglanz polieren, egal ob mit der Kante, Oberseite oder Unterseite.

Vergessen Sie den ständigen Instrumentenwechsel zwischen Spitzen, Kelchen, Bürsten und Scheiben. Mit den flexiblen Polierädchen können Sie ganz einfach auch unregelmäßige, konvexe und konkave Oberflächen polieren – im Seitenzahn- und Frontzahnbereich.



Das Sof-Lex™-Vorpolierrad (beige) entfernt durch das Konturieren entstandene Riefen und Rückstände und glättet somit die Restaurationsoberfläche.



Das Sof-Lex™-Diamantpolierrad (pink) poliert Ihre Restauration auf Hochglanz. Das 2-Stufen-Poliersystem ist so einfach, sie werden es lieben!

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produktinformationen
5092-IM	Sof-Lex™-Polieräderset – Intro Kit 5 Sof-Lex™-Vorpolierräder (beige); 5 Sof-Lex™-Diamantpolierräder (pink); 1 RA Mandrell; Gebrauchsanleitung; Step-by-Step Karte
5090	Sof-Lex™-Vorpolierräder – Refill Packung 15 Sof-Lex™-Vorpolierräder (beige)
5091	Sof-Lex™-Diamantpolierräder – Refill Packung 15 Sof-Lex™-Diamantpolierräder (pink)

www.3MESPE.de/SofLex

3M

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld
Freecall: 0800-275 3773
Freefax: 0800-329 3773
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) GmbH
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

70210002161/02 (08.2016)