

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Luftscaler

schnell,
schonend,
kraftvoll

proxeo



Prophylaxe mit Stil


Schnell, schonend, kraftvoll.

Der luftbetriebene Scaler mit integriertem Spray und zwei großen Lichtaugen ist ideal zur maschinellen Entfernung von Plaque und Zahnstein sowie zur Wurzeloberflächenreinigung. Das Ergebnis: Gesteigertes Wohlbefinden und Selbstbewusstsein Ihrer Patienten durch saubere Zahnoberflächen.



Stufenlos regulierbar

Der kraftvolle und kontrollierte Einsatz der Leistung kann je nach Anwendung über den Leistungsregler angepasst werden.

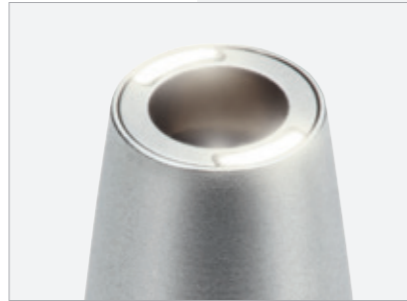

Große Lichtaugen

Zwei große Lichtaugen sorgen für eine perfekte Ausleuchtung der Behandlungsstelle.




Spitzenwechsler

Einfaches Wechseln der Spitzen und Schutz vor Verletzungen mit dem W&H Spitzenwechsler.



Integrierter Spray

Das integrierte Spray kühlt die Behandlungsstelle konstant und spült gleichzeitig abgetragene Mikropartikel und Ablagerungen weg.

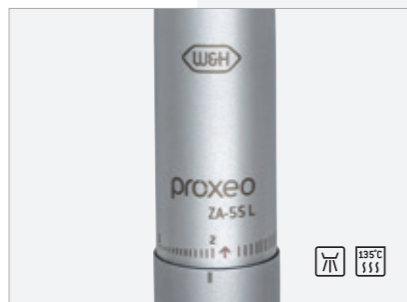

Hygieneniveau ersten Ranges

Die Instrumente sind aufgrund Ihrer glatten Oberfläche effizient zu reinigen und sowohl thermo-desinfizierbar als auch sterilisierbar.



W&H Adapterset

Das W&H Adapterset ermöglicht Ihnen die validierte maschinelle Reinigung und Desinfektion der Spitzen im Thermodesinfektor – innen und außen.

Spitzen für jede Anwendung

Vielfältig und ergonomisch perfekt.

Die Vielfalt des Spitzensortiments und die optimale Ergonomie jeder einzelnen Spitze ermöglicht Ihnen eine schonende und gründliche Zahnsteinentfernung auch an schwer zugänglichen Stellen.



Prophylaxe Spitze 1AU

Für Zahnsteinentfernung, universell einsetzbar, auch für gekrümmte Molar-Flächen mit lingualer Neigung.



Prophylaxe Spitze 2AU

Für Frontzähne im Unterkiefer, linguale Flächen, in Fällen von stark haftender dicker und harter Zahnsteinbänder.



Prophylaxe Spitze 3AU

Für Belagsentfernung am Zahnhals und auch für Abtragung von Nikotinbelägen.



Parodontologie Spitze 1AP

Entfernung von subgingivalen Ablagerungen, besonders geeignet für tiefe Parodontaltaschen.



Parodontologie Spitze 2APr, 2API

Entfernung von subgingivalen Ablagerungen. Nach rechts oder nach links gebogen erhältlich.



Parodontologie Spitze 3AP

Mit einer Diamantierung an der Instrumentenspitze für das parodontale Debridement von Furkationen und Konkavitäten.

Technische Daten

Proxeo Luftscaler



Typ:	ZA-55 L / ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Licht:	ja	nein
Leistungsregelung:	ja	nein
Schwingfrequenz:	6 kHz	
Schwingamplitude:	< 200 µm	
Betriebsdruck:	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} / _{-0,3} bar / 3 ±0,3 bar	3 ±0,3 bar / 3 ^{+0,6} / _{-0,3} bar
Kühlmittelmenge:	30 – 60 ml/min	
Kupplung:	RQ-24, RQ-34 / RM-34 LED, Multiflex®* / Sirona®*	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®*
Verwendbare W&H Spitzen:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Spitzen anderer Hersteller müssen für W&H Luftscaler freigegeben sein.	
Im Lieferumfang:	Spitze 1AU, 2AU, 3AU, 1AP, Spitzenwechsler	

* Multiflex® und Sirona® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen.



Typ:	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Licht:	nein	
Leistungsregelung:	nein	
Schwingfrequenz:	6 kHz	
Schwingamplitude:	<200 µm	
Betriebsdruck:	2,2 – 2,5 bar	
Kühlmittelmenge:	mind. 30 ml/min	
Kupplung:	 Fixanschluss	
Verwendbare W&H Spitzen:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Spitzen anderer Hersteller müssen für W&H Luftscaler freigegeben sein.	
Im Lieferumfang:	2x Spitze 1AU	



W&H Kupplung RM-34 LED für Multiflex®*-Anschluss

- › Einsatz von LED ohne notwendiger Anpassung der Dentaleinheit
- › Lange Lebensdauer der LED
- › Stufenlose Regelung der Spraywasserzufuhr
- › Rücksaugstopp
- › 24 Monate Garantie

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
 Ludwigstraße 27
 83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
 t +49 8651 904 244-0
 f +49 8651 904 244-4
 office.de@wh.com
 wh.com

W&H Austria GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-239
 f +43 6274 6236-890
 office.at@wh.com
 wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20403 ADT Rev. 004 / 09.08.2022
 Änderungen vorbehalten