

Palodent® 360

Vollmatrizensystem

TIPPS UND TRICKS



Verfügbare Größen

Wahl eines Bandes, das leicht über die Okklusalfäche übersteht.



Enge Kontakte?




Verwenden Sie einen Palodent Ring oder Holzkeil zur Separation bevor Sie die Matrize einsetzen.

Kleine Zähne

Spannen Sie die Matrize vor, damit sie initial nicht übermäßig locker sitzt.

Position des Daumenrades

Platzieren Sie das Daumenrad im Bereich der intakten Zahnwand für eine bestmögliche Sicht auf das Arbeitsfeld.

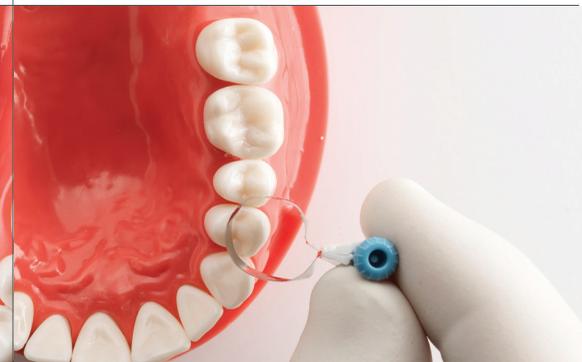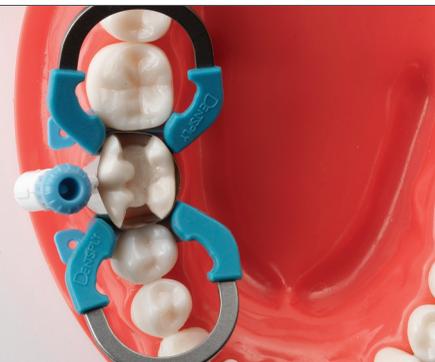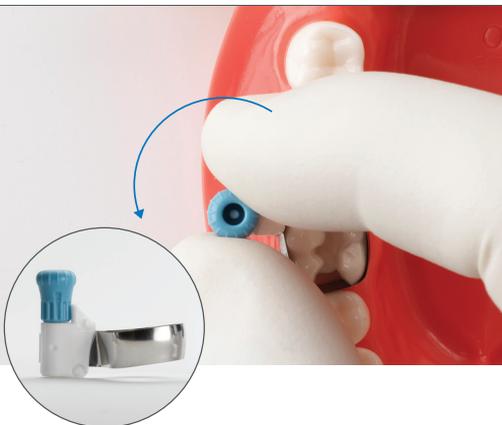

Wenn Platz oder Halt nicht ausreichen

Greifen Sie das Daumenrad fest und ziehen es in einer ratschenden Bewegung in Richtung der 2 Kreise auf der Außenseite des weißen Körpers. Lassen Sie das Daumenrad los, so dass sich der weiße Matrizenhalter wieder zurück in die zentrale Position bewegen kann.

Palodent Produkte sind aufeinander abgestimmt

Verwenden Sie einen Palodent Ring und/oder Keile, um das Matrizenband zu stabilisieren und die gewünschten Konturen zu schaffen.

Entfernen der Matrize

Drehen Sie das Daumenrad entgegen des Uhrzeigersinns. Bewegen Sie die Matrize leicht hin und her, um das Band zu lockern.