

# Bringen Sie Ihren Schutz auf den neuesten Stand.

**EuroSept® Xtra Instrumentendesinfektion Konzentrat Viruzid**



WERT & QUALITÄT



ZUVERLÄSSIG & VERTRAUENSWÜRDIG



PRODUKTAUSWAHL

# EuroSept® Xtra Instrumenten- desinfektion Konzentrat Viruzid



## Vorteile

- Hochwirksame Formel mit einem milden pH-Wert für ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Geeignet für das Ultraschallbad
- Nicht-korrosive, schaumarme Formel
- Frei von Aldehyd und Persäuren
- Konzentrierte Formel für weniger Verpackung und für mehr Nachhaltigkeit

## Gebrauchsanweisung

Für die manuelle und terminale Desinfektion von unkritischen und semikritischen medizinischen und chirurgischen Instrumenten im Tauchverfahren. Nicht geeignet für die terminale Desinfektion von kritischen medizinischen Geräten.

## Physikalische Eigenschaften

### Bedingungen

Bakterien und *Candida albicans* (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 und VAH) (schmutzige Bedingungen)

TbB-Erreger (*M. terrae*) nach EN 14348, EN 14563 (niedrige Belastung)

„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie HBV, HCV, HIV) nach RKI/DVV (schmutzige Bedingungen)

Noroviren nach EN 14476 (schmutzige Bedingungen)

Adenoviren nach EN 14476 (niedrige Belastung)

Polyoma SV 40 nach RKI/DVV (mit Belastung)

„Viruzid“ (nicht-behüllte Viren wie Adeno-, Noro-, Polioviren) nach EN 14476 (niedrige Belastung)

Pilze (*A. brasiliensis*) nach EN 13624, EN 14562 (niedrige Belastung)

Sporen (*C. difficile*) nach EN 13704 (niedrige Belastung)

### Konzentration und Expositionszeit

2,0 % 15 Min. 1,0 % 60 Min.

2,0 % 15 Min. 1,0 % 60 Min.

2,0 % 15 Min. 1,0 % 60 Min.

3,0 % 15 Min.

1,5 % 60 Min. 3,0 % 15 Min.

3,0 % 15 Min.

3,0 % 30 Min.

3,0 % 60 Min.

3,0 % 60 Min.

### Inhaltsstoffe

100 g enthalten: 8,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 5,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

**EuroSept® Xtra Instrumenten-  
desinfektion Konzentrat Viruzid**

5 L ..... Artikel-Nr. 9884868

Für unsere **HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE** sowie für weitere Produktinformationen besuchen Sie uns unter **WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE**.