

## Instrumentenaufbereitung mit der Henry Schein Eigenmarke



Die Instrumentenaufbereitung ist ein streng reglementierter Prozess und das aus gutem Grund: kontaminierte Medizinprodukte stellen ein Infektionsrisiko für Patienten und Praxispersonal dar. Für die Aufbereitung von Medizinprodukten in der Zahnarztpraxis können unterschiedliche Verfahren zur Anwendung kommen.

### Die Produkte der Henry Schein Eigenmarke


#### Exklusive Marken und Produkte

Wählen Sie aus Tausenden von Produkten aus, die nur bei Henry Schein erhältlich sind. Sicherlich das umfassendste Sortiment, das weltweit angeboten wird. Ausschließlich für medizinisches Fachpersonal.

#### Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei guter Qualität.

Vertrauen Sie unserer "Geld zurück Garantie" für alle Produkte.

Ersparnisse für Ihre Praxis.

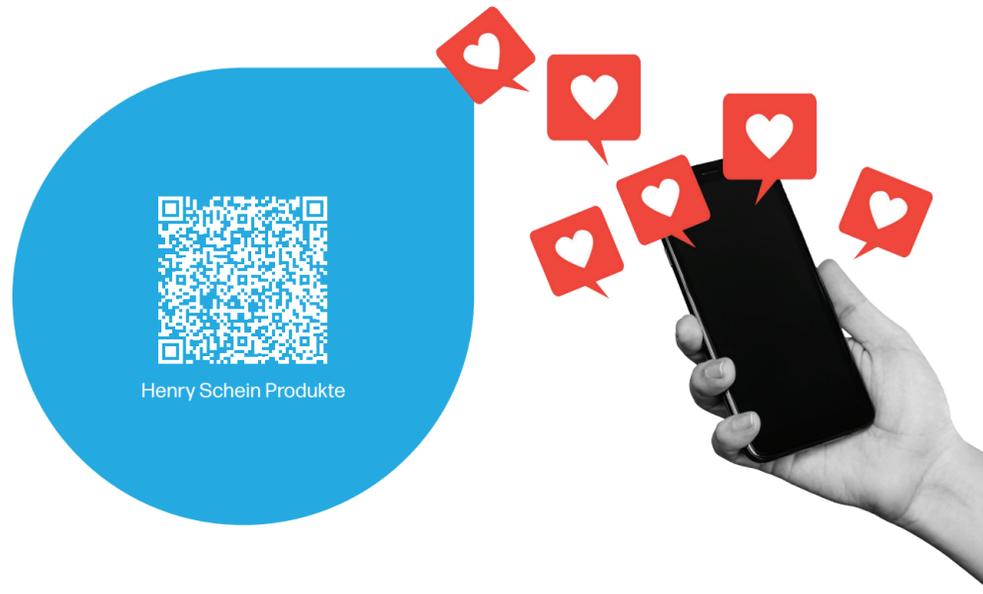

**Kontaktieren Sie uns über unsere Hotline 0800 1400044 oder sprechen Sie direkt Ihren Außendienstler: in an.**

Es gelten unsere allgemeine Lieferbedingungen, ersichtlich und abrufbar unter [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de). Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angaben von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Deutschland GmbH unter [werbewidersprueche@henryschein.de](mailto:werbewidersprueche@henryschein.de) widersprechen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten.  
Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Fotos. © AdobeStock. Erstellungsdatum: 01.03.2024.  
Medizinische Produkte für die Zahnpflege, nur für Mitarbeitern der Gesundheitsberufe vorbehalten. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett sorgfältig durch.

HENRY SCHEIN®

Rely on Us™



## Instrumentenaufbereitung mit der Henry Schein Eigenmarke



ZUFRIEDEN ODER  
GELD ZURÜCK



GROSSE AUSWAHL

0800 1400044 | HenrySchein-Dental.DE

# 1

## Vorbereitung



+ HS-Enzymatischer Instrumentenreiniger

+ HS-Instrumentendesinfektion Konzentrat

+ HS-Instrumentendesinfektions Konzentrat viruzid



+ HS-Instrumentenwanne für Trockenabwurf



BA ULTIseal BASE740 Folienschweißgerät

HS-Sterilisationsfolien & Beutel



HS-Indicator Tape

FÜR DIE WÄSCHE

- + HS-Bowie & Dick Cassette Metall
- + HS-Bowie & Dick Test Kit
- + HS-Bowie & Dick Test Refill




Instrumente in den Sterilisationsbeutel



# 4

## Sterilisationsprozess

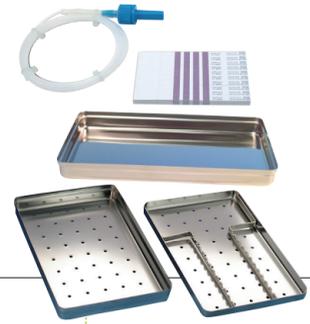

WEITERES ZUBEHÖR

- + HS-Chemo Indikator Klasse 6 Steriprozess
- + HS-Edelstahl Instrumentenrack
- + HS-Edelstahltray Oberteil gelocht
- + HS-Edelstahltray Unterteil ungelocht
- + HS-Edelstahltray Unterteil ungelocht
- + HS-Helix Test Body
- + HS-Helix Test Kit
- + HS-Helix Teststreifen



ENTDECKEN SIE MEHR HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE AUF UNSERER WEBSITE: [WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE](http://WWW.HENRYSCHEIN-DENTAL.DE)


# 2

## Manuelle Reinigung



HS-Enzymatischer Instrumentenreiniger

HS-Reinigungsbürste

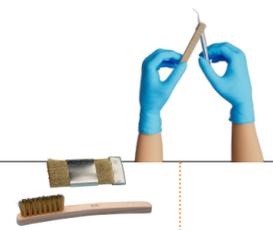

HS-Einwegtücher oder Trockenpusten



+ zum Trocknen

HS-Ultraschallreiniger

+ Mischen von 990 ml Wasser mit 10ml Reiniger - Wasser nicht wärmer als 40°C. Verbleib der Instrumente in der Flüssigkeit für 5 - 30 Min, je nach Verschmutzungsgrad.



TIPP  
5% ige Lösung für stark kontaminierte Instrumente + Dosiertabelle. Instrumente sofort und geöffnet in die Lösung legen

HS-Orange-Cleaner



HS-Instrumentenwanne für Trockenabwurf



TIPP  
Wartung der Instrumente: HS-Ölspray & HS-Handtücher



# 2

## Maschinelle Reinigung



HS-EuroSept® Xtra Thermo-Produkte

Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) / Thermodesinfektor



HS-Wash Test Prüfleiste



HS-Wash Test Indikatorstreifen

HS-Destilliertes / demineralisiertes Wasser

+ zum Nachspülen der Instrumente



HS-Instrumentendesinfektions Konzentrat viruzid

+ Lösung mindestens 1x täglich wechseln oder wenn es sichtbar verschmutzt ist



HS-Destilliertes / demineralisiertes Wasser



HS-Einwegtücher oder Trockenpusten



HS-Enzymatischer Instrumentenreiniger

+ Anmischen und Verbleib in der Lösung variiert je nach Produkt

Desinfektionsprozess

# 3

HS-Instrumentendesinfektion Konzentrat

+ Instrumente sofort und geöffnet in die Lösung legen