

# Professionelle Zahnreinigung (PZR)

der Henry Schein  
Eigenmarke und  
Exklusiven



Zahnpflege gehört für die meisten Menschen zum Alltag wie Essen und Schlafen. Eine regelmäßige und professionelle Zahnreinigung (PZR) in Ihrer Zahnarztpraxis nutzt den Patient:innen bei der Bekämpfung, beziehungsweise Vorbeugung von Karies und Parodontitis. Ebenso hat die Behandlung einen kosmetischen Effekt, da Belege entfernt werden und damit ein strahlendes Lächeln zum Vorschein kommt. Auch Fragen und Tipps zur Mundhygiene sind bei einer PZR Pflichtprogramm. Ob Putzsystematik, Hilfsmittel zur Zahnzwischenraumreinigung oder Mundspülung – zur täglichen Pflege der Mundhöhle gehört einiges. Was für Patienten individuell wichtig ist, wird von Ihnen in der Praxis bei einer PZR ebenfalls besprochen. Eine PZR sorgt also nicht nur für ein strahlendes Lächeln, sie ist auch elementarer Bestandteil eines präventionsorientierten Gesamtkonzepts zur Vermeidung und Therapie von Volkskrankheiten wie Karies und Parodontitis – einer bakteriell bedingten Entzündung, die eine weitgehende Zerstörung des Zahnhalteapparates zur Folge haben kann.

## Die Produkte der Henry Schein Eigenmarke

### Exklusive Marken und Produkte

Wählen Sie aus Tausenden von Produkten aus, die nur bei Henry Schein erhältlich sind. Sicherlich das umfassendste Sortiment, dass weltweit, angeboten wird. Ausschließlich für medizinisches Fachpersonal.

### Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei guter Qualität.

Vertrauen Sie unserer "Geld zurück Garantie" für alle Produkte.

Ersparnisse für Ihre Praxis.

- 1 Vorbereitung des Arbeitsplatzes, des/der Behandler:in, des/der Patient:in
- 2 Scaling
- 3 Pulverstrahlen
- 4 Polieren
- 5 Interdentalraum-Reinigung
- 6 Fluoridierung

ACCLEAN®

Tägliche Prophylax-Maßnahmen für gesunde Patienten

An Ihrer Seite, um Ihnen den Tag ein wenig zu erleichtern



von HENRY SCHEIN®



Kontaktieren Sie uns über unsere Hotline 0800 1400044 oder sprechen Sie direkt Ihren Außendienstler:an.

Es gelten unsere allgemeine Lieferbedingungen, ersichtlich und abrufbar unter [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de). Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angaben von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Deutschland GmbH unter [werbewidersprache@henryschein.de](mailto:werbewidersprache@henryschein.de) widersprechen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Fotos, © AdobeStock, Erstellungsdatum: 01.03.2024. Medizinische Produkte für die Zahnpflege, nur für Mitarbeiter der Gesundheitsberufe vorbehalten. Lesen Sie vor Gebrauch die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett sorgfältig durch.

HENRY SCHEIN®

Rely on Us™



# Professionelle Zahnreinigung (PZR)

der Henry Schein Eigenmarke  
und Exklusiven



ZUFRIEDEN ODER  
GELD ZURÜCK



GROSSE AUSWAHL

0800 1400044 | [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de)



# 1

Vorbereitung des Arbeitsplatzes: für Behandler:in und Patient:in



- HS-Mundschutz
- HS-Handschuhe
- HS-Brillen-/Spritz- und Sichtschutz

## Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- HS-Speichelsauger
- HS-Absaugkanülen
- HS-Tray & HS-Traypapier & HS-Schwebetischauflagen
- HS-Watterollen & HS-Watterollenspender & HS-Pinzette
- HS-Facial tissues
- HS-Mundspülbecher
- HS-Dappenglas
- HS-Mulltupfer
- HS-Mundspiegel
- HS-Küretten
- HS-Scaler

## Vorbereitung der/des Behandler:in

- HS-Mundschutz
- HS-Handschuhe
- HS-Brillen-/Spritz- und Sichtschutz

**TIPP**  
Schnelles Arbeiten durch eine perfekte Arbeitsplatzvorbereitung

## Vorbereitung des / der Patienten:in

- HS-Einmalzahnbürste
- HS-Schutzbrille
- HS-Patientenserviette & HS Serviettenhalter
- HS-Patientenumhang
- HS-Wangenhalter
- HS-Cocoabutter
- HS-Mundspüllösung

# 6

## Fluoridierung

### Tipps für die Mundhygiene



HS-Fluoridhaltiger Lack für Kinder

**TIPP**  
unter 18 Jahren wird die PZR bei Kindern von den Krankenkassen übernommen

# 2

## Scaling



B.A. ZEG Spitzen

B.A. Piezo Scaler Set und B.A.C 200 Ultraschallgerät

### HS-Floss

- unterschiedliche Flossarten
- Spenderboxen
- Floss mit Riser-Effekt
- Minispender

### HS-Interdentalbürstchen

- Große Auswahl an unterschiedlichen Größen
- Verlängerungshandstück in der Verpackung enthalten
- starker, kunststoffüberzogener Draht, daher kein unnötiges Verbiegen



# 5


## Interdentalraum-Reinigung



ENTDECKEN SIE DIE WEITEREN HENRY SCHEIN EIGENMARKENPRODUKTE AUF UNSERER WEBSITE: [WWW.HENRYSCHHEIN-DENTAL.DE](http://WWW.HENRYSCHHEIN-DENTAL.DE)

# 3

## Pulverstrahlen

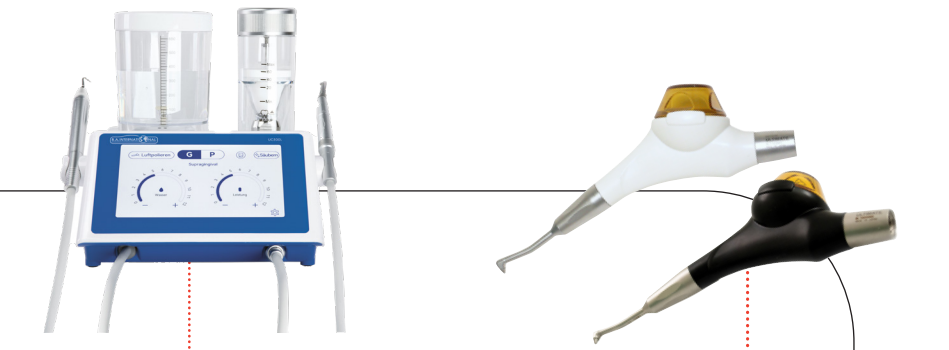

B.A. Ulticlean Combi UC500L Prophylaxegerät

B.A. Ultimate Pulverstrahlgeräte



HS-Prophylaxe-Kelche & HS-Prophylaxe-Bürstchen & HS-Einmalprophylaxe-Kelche



B.A. & HS-Acclean Prophylaxe-Pulver



HS-Einweg Dappengläser



HS-Polierpaste

**TIPP**  
Bitte beachten Sie die Arbeitszeiten in der Anleitung



B.A. gerades Handstück

# 4

## Polieren