

Sinterempfehlung Zirlux 16+ pre shaded

	Mihmvoigt zirkon-100 - Tabeo				
Zirlux 16+ Normales Sinterprogramm	Stufe	Start Temp(°C)	End-Temp(°C)	Zeit (min)	Aufheizrate(°C/min)
	1	Raumtemperatur	1200	30	8
	2	1200	1300	0	2
	3	1300	1530	120	4
	4	1530	200	0	8

	Mihmvoigt zirkon-100 - Tabeo				
Zirlux 16+ Schnell- Sinterprogramm für Einzelkronen und 3gl. Brücken	Stufe	Start Temp(°C)	End-Temp(°C)	Zeit (min)	Aufheizrate(°C/min)
	1	0	0	0	0
	2	Raumtemperatur	1150	0	25
	3	1150	1530	60	4
	4	1530	200	0	25

Sinterempfehlung Zirlux Anterior Multi

	Mihmvoigt zirkon-100 - Tabeo				
Zirlux Anterior Multi Normales Sinterprogramm	Stufe	Start Temp(°C)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min)	Aufheizrate (°C/min)
	1	Raumtemperatur	1150	30	8
	2	1150	1300	0	2
	3	1300	1450	120	4
	4	1450	200	0	8

	Mihmvoigt zirkon-100 - Tabeo				
Zirlux Anterior Multi Schnell- Sinterprogramm für Einzelkronen und 3gl. Brücken	Stufe	Start Temp(°C)	End-Temp(°C)	Zeit (min)	Aufheizrate(°C/min)
	1	0	0	0	0
	2	Raumtemperatur	1150	0	20
	3	1150	1450	60	3
	4	1450	200	0	25

Sinterempfehlung Zirlux Complete/Esthetic TR

	Mihmvoigt zirkon-100 - Tabelle				
Zirlux Complete/Esthetic TR Normales Sinterprogramm	Stufe	Start Temp(°C)	Temperatur (°C)	Haltezeit (min)	Aufheizrate (°C/min)
	1	Raumtemperatur	1150	30	8
	2	1150	1300	0	2
	3	1300	1480	120	4
	4	1450	200	0	8