



Deutsch



Programmnummer

01

Max Ofentemperatur

1.650

Programmname

ZIRLUX Complete

☐ Voreinstellung

Controller Typ

P470/P480

Controller Version

> V1.24

☐ Program wiederholen☐ Chargenregelung

Segment	Start	Ende	Zeit	Rate	Extra 1	Extra 2	Extra 3	Extra 4	Extra 5	Extra 6	Kühlung
Nr	°C	°C	hhh:mm	%/h							
1	0	1.150		480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	1.150	1.150	000:30		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	1.150	1.300		120	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	1.300	1.480		240	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	1.480	1.480	002:00		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	1.480	800		480	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	800	100		STEP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	END				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
33					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
34					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
35					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
36					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
37					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
38					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
39					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

