


KaVo Primus™ 1058 Life

Ich verlass mich drauf.

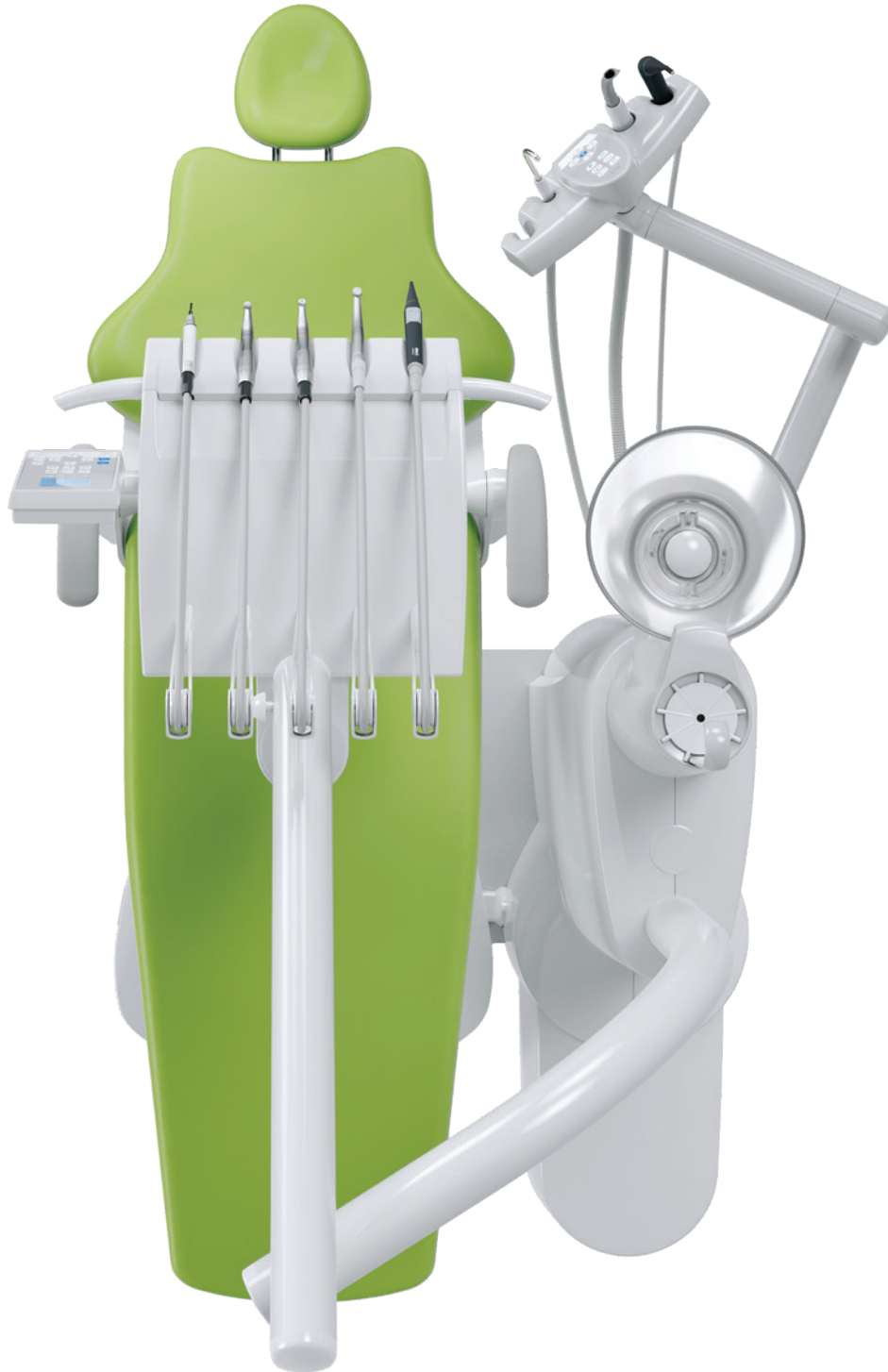



Zuverlässig, Tag für Tag für Tag

Bei der Primus 1058 Life wurde allergrößter Wert auf Solidität und Funktionssicherheit gelegt. Profitieren Sie außerdem von der ausgeprägten Wirtschaftlichkeit – heute und morgen. Beweisen Sie Ihr Gespür für ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und schließen Sie sich den Tausenden von Zahnärzten weltweit an, die von ihrer Primus 1058 sagen: „Sie läuft und läuft und läuft.“

Highlights auf einen Blick:

Der Patientenstuhl

1. Schlankeres Stuhl-Design in modernem Dentalweiß
2. Bis zu 185 kg belastbar
3. Integrierte Trendelenburgbewegung für Ihre Patienten
4. Erweiterte Höchst-/Tiefstpositionen
5. Optimierte Softpolsterform, optional RELAXline Softpolster

Die Arzt- und Assistenzelemente

6. Arztelement in modernem Design
7. Einfaches Bedienkonzept mit mehr Direktwahltasten
8. Assistenzelement mit übersichtlicher Bedienfolie und verbessertem Bedienkomfort

Patientenkommunikation

9. KaVo ERGOcam One* Intraoralkamera und KaVo DIAGNOcam*
10. KaVo Screens mit HD-Auflösung, 19 Zoll und 22 Zoll
11. Die Systemsoftware CONEXIO vereint Patientenmanagementsoftware, 2D-Röntgenbildarchiv und intraorale Livebilder in einer einzigartigen Bedienphilosophie.

*Produkt nicht abgebildet



**Die Schwingenversion**

Bessere Auszugslängen sowie hygienische Schlauchführung.
So liegen ausbalancierte Instrumente immer perfekt in der Hand.

Die Cartversion

Ein Mehr an Mobilität, gepaart mit einfacher Bedienung.
Stellen Sie Ihr Cart bei Bedarf einfach zur Seite.

**Die Tischversion**

Noch mehr Bewegungsfreiheit für ergonomisches
Arbeiten in jeder Behandlungsposition.



Mit MEMOSpeed rufen Sie abgespeicherte
Parameter für jedes Instrument schnell und
zuverlässig wieder ab.



Das leicht bedienbare Arztelement: durchdacht vereinfacht

Ganz gleich, ob Sie im Sitzen oder im Stehen behandeln:
Das Arztelement Ihrer Primus 1058 Life unterstützt Sie
mit durchdachter Ergonomie. Kein Strecken und kein
Verdrehen nötig. Optimierte Greifwege sorgen jederzeit
für effiziente Abläufe.

Einfach, wie für mich gemacht

Stellen Sie Ihr Arztelement exakt nach Ihren Anforderungen zusammen. Sie können dabei
fünf Instrumentenablagen frei konfigurieren. Auch im Nachhinein können noch Anpassungen
vorgenommen werden. Damit bleiben Sie auch in Zukunft flexibel.

Ohne Umwege, direkt zum Ziel

Genießen Sie zeitsparendes Arbeiten dank mehr Direkttasten für automatische Funktionen.
Bewahren Sie leicht den Überblick mit der übersichtlichen Bedienfolie und dem integrierten
Display.

Ein Platz zum Wohlfühlen. Entspannung pur.

Patienten, die sich auf dem Behandlungsstuhl wohlfühlen, bewegen sich deutlich weniger. Das neu konzipierte RELAXline Softpolster und die ergonomische Polsterform tragen wesentlich dazu bei. So arbeiten Sie effizienter und können sich ganz auf die Behandlung konzentrieren.

RELAXline Softpolster

Ein extrem bequemer Memo-Schaum, umhüllt von einem weichen, lederartigen Obermaterial in eleganten Farben und mit handgefertigten Designnähten, sorgt für eine entspannte Patientenlagerung auch bei längeren Behandlungen.

Gut für Sie. Gut für Ihre Patienten.

Je nach Indikation oder Patientengröße lässt sich mit dem flexiblen Wendepolster und der 2-Gelenk-Kopfstütze die richtige Position finden, in der Ihr Patient perfekt liegt und Sie perfekt arbeiten können.




Rückenlehne Progress: optimale Arbeitshaltung und optimaler Zugang für den Zahnarzt



Einfach komfortabel: die einhändig bedienbare 2-Gelenk-Kopfstütze mit drehbarem Kopfpolster

Ideal für alle Anforderungen

Sie können die KaVo Primus 1058 Life auf Ihre persönlichen Anforderungen und Gewohnheiten einstellen. Die zwischen 350 mm und 830 mm stufenlos einstellbare Höhe des Patientenstuhls gewährleistet ergonomisch optimale Bedingungen, egal ob Sie im Sitzen oder im Stehen behandeln.

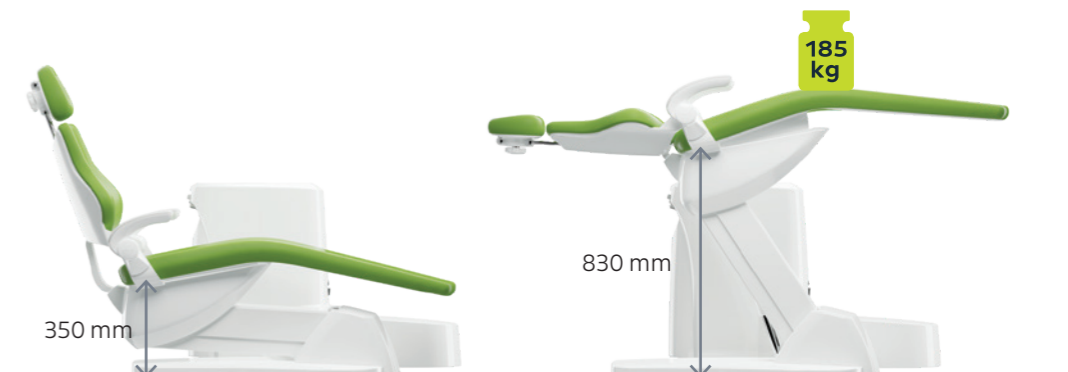

COMPACTchair

Bieten Sie Ihren älteren und immobileren Patienten einen bequemen Ein- und Ausstieg. Die Liegefläche des KaVo COMPACTchair lässt sich hierfür abknicken. Schaffen Sie eine noch persönlichere Beratungssituation, indem Sie Ihre Patienten beraten, während diese sitzen, und anschließend behandeln, während diese liegen.

Profitieren Sie von mehr Flexibilität.



Halten Sie Ihre Hände frei für Wichtiges.

Je weniger Sie berühren müssen, desto hygienischer ist Ihre Arbeit. Steuern Sie Instrumenten- und Stuhlfunktionen einfach mit dem Fuß. Eine effiziente Vorsorge gegen Kreuzkontaminationen. Bedienen Sie den Fußanlasser Ihrer Primus 1058 Life horizontal statt mit einer Auf-und-ab-Bewegung wie bei einem Gaspedal. Sie entlasten damit langfristig Ihre Beinmuskeln und können völlig entspannt arbeiten.

Ihre Assistenz hat alles im Griff.

Genießen Sie die flüssige Zusammenarbeit mit Ihrer Assistenz. Ihr Arbeitsablauf wird durch ein individuell positionierbares Assistenzelement bestmöglich ergänzt. Selbstverständlich finden Sie auch hier das Konzept der Direktwahltasten wieder.



Seitenwechsel leicht gemacht

Sie behandeln als Linkshänder bzw. allein? Dann schätzen Sie sicher das nach rechts/links schwenkbare Assistenzelement. Hinzu kommen noch die enorme Bewegungsfreiheit des großen Schwenkbereiches sowie die stufenlose Höhenverstellung.

Links oder rechts? Immer richtig!

Die Primus 1058 Life ist als Links- oder Rechtshändereinheit erhältlich. Erleben Sie ein Höchstmaß an Flexibilität und damit Investitionssicherheit mit Ihrer KaVo Primus 1058 Life. Egal, wie Sie sich entscheiden, Sie können sich jederzeit umentscheiden.



Ergonomie und Komfort in Perfektion: der KaVo PHYSIO Evo

Für Sie als Zahnarzt ist es besonders wichtig, eine dauerhaft ergonomisch gesunde und komfortable Körperhaltung in jeder Behandlungssituation einzunehmen. Nichts beeinflusst Ihre Körperhaltung so sehr wie der Arbeitsstuhl, auf dem Sie täglich sitzen. So ist der KaVo PHYSIO Evo und Evo F exakt auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe von Zahnärzten und Assistenten ausgerichtet.



Ergonomie steckt im Detail.

Dank getrennter Einstellfunktionen lassen sich Sitzfläche und Rückenlehne individuell auf Ihre anatomischen Anforderungen und Ihren persönlichen Behandlungsstil anpassen. Rücken- und Sitzpolster des KaVo PHYSIO Evo sind ergonomisch geformt. Die zentrierte Erhöhung im Sitzpolster bietet einen stabilen Sitz und verhindert Verrutschen selbst bei schnellen, kurzen Rollbewegungen. Die abgerundete Oberschenkelauflage bietet viel Bewegungsfreiheit.

Dank der federkraftunterstützten Rückenlehne wird die Rückenmuskulatur insbesondere im Lendenwirbelbereich permanent aktiv gestützt und so dauerhaft geschont. Reibungslose Arbeitsabläufe und größtmöglicher Sitzkomfort werden damit bei jeder Behandlung selbstverständlich.



Ein ausgezeichnetes Konzept

Der Behandlungsstuhl KaVo PHYSIO Evo ist mit dem Gütesiegel des Vereins „Aktion gesunder Rücken“ (AGR) ausgezeichnet. Eine unabhängige, multidisziplinäre Expertenkommission legt dieser Auszeichnung strenge Prüfkriterien für Ergonomie und Gesundheit zugrunde.



Ausstattungen für einen effizienteren Praxisalltag

Verschaffen Sie sich täglich einen Vorsprung mit den praxisorientierten Ausstattungsoptionen. Das breite Ausstattungsspektrum der Primus 1058 Life sorgt für Lösungen, die ihren Preis wert sind.



Der innovative COMPOsave™ Modus filtert sämtliche Blauanteile des Lichts heraus und verlangsamt so das Aushärten des Füllmaterials.



Behandlungsleuchte MAIA LED

Besseres Licht für beste Ergebnisse

Mit der Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED haben Sie ein natürlich weißes Licht in höchster Qualität mit eingebautem Hygienevorteil zur Hand. Das berührungslose Ein- und Ausschalten vermeidet Kreuzkontaminationen. Das geschlossene Gehäuse, glatte Oberflächen und abnehmbare Griffe sind schnell zu reinigen.



Intraorales Röntgen immer in Reichweite

Einfach mit einem Adapter den KaVo FOCUS™ installieren und schon können Sie direkt an der Behandlungseinheit optimal an die radiologische Indikation angepasste Röntgenaufnahmen erstellen – hochpräzise, zeitsparend und ganz nah am Patienten.

Höchstleistung liegt in Ihrer Hand.

Erleben Sie, was Motoren alles leisten können. Mit Drehzahlspektren von 100 bis 40.000 U/min bei einfacher Übersetzung.



KaVo INTRA LUX KL 701 LED:
kompakt im Design, mit geringem Gewicht. Wartungsarm und höchst zuverlässig.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED:
noch kleiner, noch leichter und mit mustergültiger Gewichtsverteilung. Power ohne Ende. Für ermüdungsfreies Arbeiten.



Zwei Scaler für einzigartige Vielfalt an Ihrer Behandlungseinheit


Mit dem PiezoLED Ultraschall-Scaler wird die Zahnreinigung hochpräzise und zeitsparend: Linear schwingende Titansonotroden sorgen für eine besonders effektive Behandlung. Zähne und Zahnfleisch bleiben auch in filigranen Bereichen unberührt, da Ihnen zirkuläre Lichtemissionen eine optimale Sicht ermöglichen und Sie durch das leichte, ergonomische Design ermüdungsfrei und extrem exakt arbeiten können.

Das KaVo SONICflex ist das Universalgenie für fast alle Indikationen und wird dank seiner vielfältigen Möglichkeiten eines Ihrer am meisten eingesetzten Instrumente sein: Mit über 50 Spitzen, die sich mit nur einer Umdrehung wechseln lassen, ist es perfekt für sämtliche Anwendungsbereiche wie z. B. Prophylaxe, Endodontie, Parodontologie, minimalinvasive Kariestherapie, Chirurgie oder Präparation.

CONEXIO verbindet, was zusammengehört.



Steuern Sie die Patientenkommunikation bequem am Arztelement. Fügen Sie neue Bilder direkt der digitalen Patientenakte hinzu. Die Primus 1058 Life mit CONEXIO bietet Ihnen ganz neue Möglichkeiten.

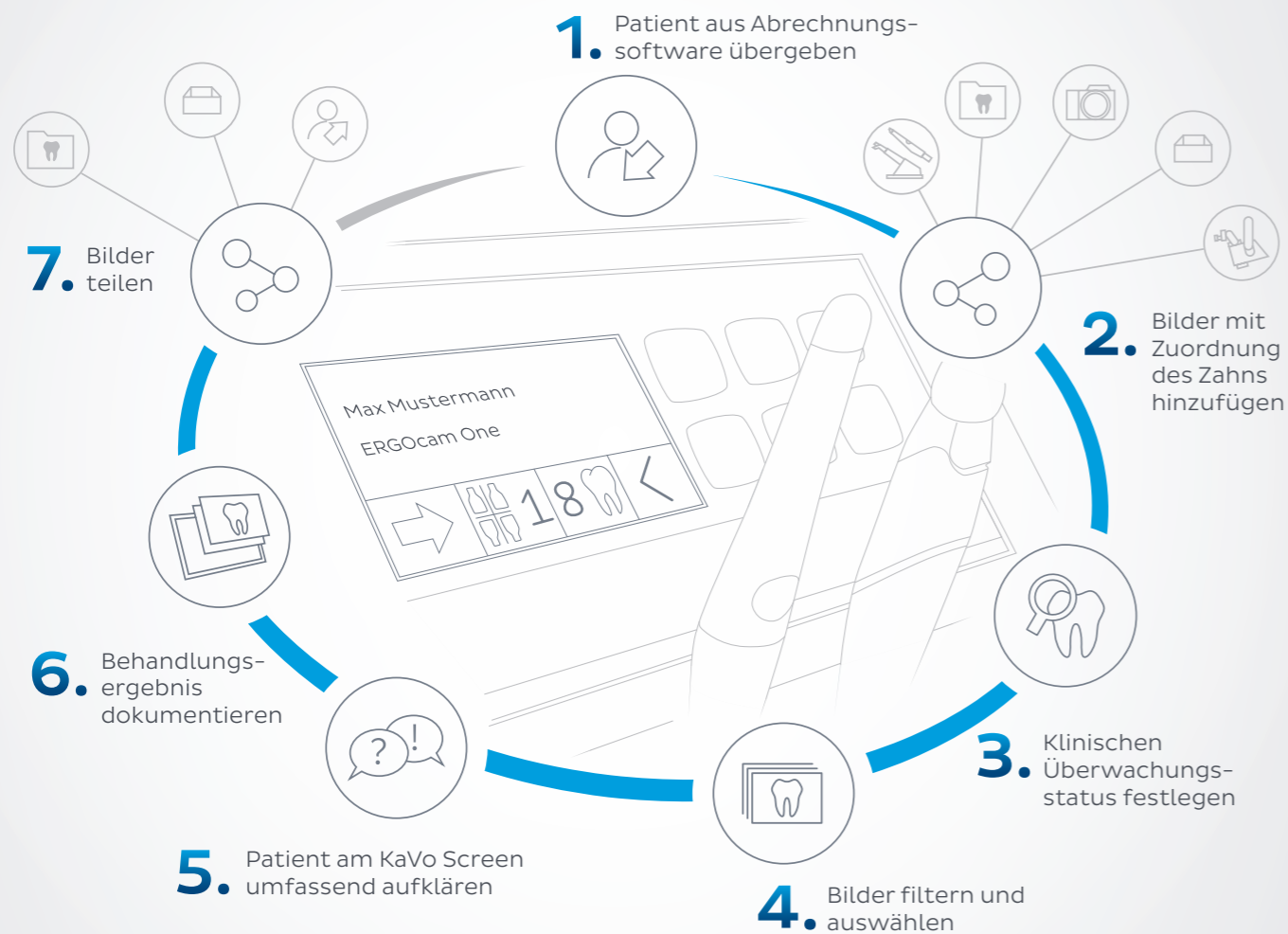

Perfekter Überblick: der klinische Überwachungsstatus

Jedes Bild wird bei der Befundaufnahme einem Zahn des Patienten zugeordnet. Dabei können Sie einen klinischen Überwachungsstatus von „gesund“ bis „kritisch“ festlegen. Der Vergleichsmodus gibt Ihnen die Möglichkeit, noch während der Befundung eine Verlaufskontrolle mit älteren Bildern des Zahnes oder auch Bildern aus anderen Quellen durchzuführen.

EINES FÜR ALLES

Wechseln Sie vom Behandlungsmodus in die Welt der digitalen Bilder und zurück mit nur einem Klick auf das Arztelement. CONEXIO vereinfacht Ihren Arbeitsablauf – ohne Maus, Tastatur und weiteren PC.




KaVo DIAGNOcam. Der Karies um Lichtjahre voraus.

Intraoralsensoren, 2D- oder 3D-Röntgengeräte zeigen Karies häufig erst, wenn diese das Dentin erreicht hat. Die KaVo DIAGNOcam ist die ideale Ergänzung zur klassischen Kariesbefundung: Mit ihr erkennen Sie Approximal- und Okklusalkaries viel früher und einfacher. Frei von Verfälschungen durch Plaqueablagerungen oder Überlappungen sehen Sie die Zahnstruktur und Karies in beeindruckender Brillanz und Klarheit – ohne Wartezeit, direkt am Behandlungsplatz, ohne Röntgenstrahlen.

KaVo ERGOcam One – kleine Kamera einfach groß

Erläutern Sie Ihren Patienten die jeweilige zahnmedizinische Situation anhand von Bildern der KaVo ERGOcam One. Mit hoher Tiefenschärfe und hervorragender Farbwiedergabe.

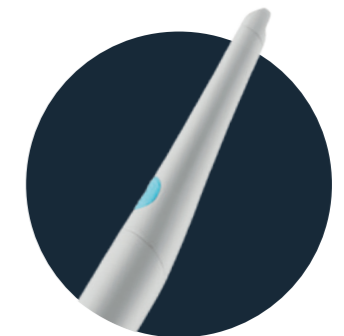

Zeigen Sie es Ihren Patienten.

Die Bildschirme überzeugen mit hochauflösender Bildqualität, hohen Kontrastwerten und brillanter Farbwiedergabe.

KaVo Screen One

- HD-True-Flatscreen
- Bildverhältnis: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 19 Zoll
- Zwei digitale Eingänge (Mikroskop und PC)

KaVo Screen HD

- Full-HD-True-Flatscreen
- Bildverhältnis: 16:9
- Bildschirmdiagonale: 22 Zoll
- Zwei digitale Eingänge (Mikroskop und PC)



Moderne Hygiene: einfach und sicher

Die Reinigung Ihrer Primus 1058 Life ist denkbar einfach. Nehmen Sie zum Desinfizieren wichtige Bestandteile wie z. B. Silikonmatte, Instrumentenablage, Schwingenbügel und Mundspülbecken mühelos ab. Sämtliche Oberflächen sind leicht zu säubern.



Die Dauerentkeimung reduziert unter Zugabe von KaVo OXYGENAL 6 die Keimentwicklung im Behandlungswasser. Glatte Oberflächen, abnehmbare Schutzabdeckungen und Instrumentenablagen erleichtern die Reinigung. Die Saugfilter sind dank Hygienegriff einfach und sicher wechselbar.



Schützen Sie Ihre Leitungen vor verkeimtem Wasser.

Verhindern Sie die Rückkontamination in Ihre Hausversorgungsleitung mit dem DVGW-zertifizierten Wasserblock. Eine Dauerentkeimung mit KaVo OXYGENAL 6 sorgt für die permanente Reduktion von Keimen. Mit dem Intensiventkeimungsprogramm schützen Sie Ihre Patienten vor Mikroorganismen, die sich in Stagnationszeiten wie Wochenende oder Urlaub bilden können.

Minimieren Sie Risiken durch das Spülpro- gramm nach RKI.

Erfüllen Sie die Anforderung der aktuellen RKI-Richtlinien. Ihre KaVo Primus 1058 Life sorgt dazu für die standardisierte und automatisierte Spülung der Instrumente vor Arbeitsbeginn und nach jedem Patienten.

Die reinigende Kraft des Wassers – HYDROcLean

Starten Sie das automatisierte HYDROcLean-Programm zur Reinigung der Amalgamabscheide-, Saug- und Abflusssysteme Ihrer Behandlungseinheit mit Wasser. Vermeiden Sie dadurch Ausfallzeiten und Kosten für die Wartung.

Mehr Schutz durch weniger Rücksaugeffekt

Ein automatischer Rücksaugstopp an KaVo Instrumenten und Motoren verhindert, dass kontaminiertes Spraywasser in die Behandlungseinheit gesaugt wird. Dadurch ist das Wasserversorgungssystem verlässlich geschützt.



Sparen Sie Zeit mit dem anwendungsfertig gemischten KaVo DEKASEPTOL Gel. Das direkt einsetzbare Gel benetzt Absaugschläuche und -systeme und haftet an den kritischen Stellen, anstatt einfach nur durchgespült zu werden.



Lackfarben metallic



Lackfarben uni



Bitte beachten: Druckfarben geben die Oberfläche nicht farbgetreu wieder. (KaVo Farbkarte anfordern!)

Polsterfarben



Qualität, die sich auszahlt

Mehr als 45.000 Mal bewährt. Die Primus 1058 wurde seit jeher für Dauerleistung konzipiert. Hochwertige Bauteile und Komponenten werden hierfür perfekt aufeinander abgestimmt und in höchster Präzision verarbeitet. Von der kleinsten Schraube bis zum ganzen Gerätekörper ist alles auf größte Beanspruchung und Langlebigkeit ausgelegt. Unsere Produkte werden umfassenden Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich Ihren täglichen Anforderungen standhalten. Um Ausfälle oder andere kostenintensive Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Damit Sie uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen schenken.

RELAXline Softpolster



Greenery Edition



Ausstattungsoptionen

	TM	S	Cart
Patientenstuhl			
Standard	●	●	●
COMPACTchair	○	○	○
Softpolster	●	●	●
RELAXline Softpolster	○	○	○
Rückenlehne			
Progress	●	●	●
Comfort ²	○	○	○
Kopfstütze			
Komfortkopfpolster	○	○	○
2-Gelenk mit Drehknopf	●	●	●
2-Gelenk mit Drucktaste	○	○	○
Armlehne			
Rechts	○	○	○
Links	○	○	○
Arztelement			
Turbinenschlauch	○	○	○
KL-Motor 701	○	○	○
KL-Motor 703 LED™	○	○	○
Dreifunktionshandstück	○	○	○
Multifunktionshandstück	○	○	○
COMFORTdrive™	○	○	○
SMARTdrive™	●	●	●
PiezoLED™ Ultraschall-Scaler	○	○	○
SONICflex™ Schallscaler	○	○	○
Memospeed-Anzeige, indikationsbezogen	○	○	○
Panorama-Röntgenbildbetrachter ⁴ (an Leuchtenaufbaustange)	○	○	○
Panorama-Röntgenbildbetrachter (an Tischelement)	-	-	○ ³
Tablettaufnahme US-Tray	x	x	○
Tablettaufnahme 1 Norm-Tray	x	-	x
Tablettaufnahme 2 Norm-Trays	○	○	-
Sprayerwärmung für Instrumente	○	○	○
Funktionstaste Klingel	○	○	○
Patientenkommunikation			
KaVo Screen One	○	○	○
KaVo Screen HD	○	○	○
CONEXIO™	○	○	○
KaVo ERGOcam™ One Intraoralkamera	○	○	○
KaVo DIAGNOcam™	○	○	○

	TM	S	Cart
Assistenzelement			
Spraynebelabsaugung	●	●	●
Speichelzieher	●	●	●
2. Speichelzieher	○	○	○
Dreifunktionshandstück	○	○	○
Mehrfunktionshandstück	○	○	○
Polymerisationsleuchte Satelec MiniLED	○	○	○
Trayhalter für Tablettaufnahme	○	○	○
Schwenk- und höhenverstellbares Assistenzelement	●	●	●
Nach rechts/links schwenkbare und höhenverstellbares Assistenzelement ¹	○	○	○
Saugschlauchführung	○	○	○
Selektivablage	○	○	○
Gerätekörper			
Mundspülbecken Porzellan	x	x	x
Mundspülbecken Glas	x	x	x
VACUstopp	●	●	●
Dauerentkeimung ⁵	●	●	●
Intensiventkeimung ⁶	○	○	○
HYDROclean	●	●	●
Warmwasserboiler	○	○	○
Versorgungssystem			
Wasserblock DVGW	x	x	x
Wasserblock, kompakt	x	x	x
Wasserflasche DVGW	x	x	x
Unterdruckregler	○	○	○
Zusatzgeräteanschluss	○	○	○
Entsorgungssystem			
Externe Absaugung	x	x	x
DÜRR Amalgamabscheider	x	x	x
DÜRR Separierautomatik	x	x	x
Festteilesammler	x	x	x
Sonstiges			
KaVo PHYSIO Evo / Evo F	○	○	○
KaVo PHYSIO One	○	○	○
Behandlungsleuchte KaVoLUX™ 540 LED	○	○	○
Behandlungsleuchte MAIA LED	○	○	○
Leuchtenaufbaustange	○	○	○
Adapter für Leuchtenaufbaustange	○	○	○
Patientenservicebox	○	○	○
Servicetisch 1568	-	-	○
DEKASEPTOL Gel Basisset	●	●	●

● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung x Muss gewählt werden – Nicht lieferbar

1. Nicht bei Patientenstuhl COMPACTchair.

2. Nur bei Patientenstuhl COMPACTchair.

3. Nicht geeignet bei Anbringung unter einer Tischplatte.

4. Nicht in Verbindung mit Multimedia.

5. Nur mit Wasserblock DVGW oder Wasserflasche DVGW.

6. Nur in Verbindung mit Wasserblock DVGW.

KV_5_18_0704_REV1 Technische Änderungen vorbehalten. Geringfügige Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. © Copyright KaVo Dental GmbH.