

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Sinius

Mehr Effizienz

dentsplysirona.com/sinius



Mit Preisinformation!



Mit mehr Effizienz zu mehr Balance im Praxisalltag

Zeit ist eines der kostbarsten Güter, das wir haben. Gut, dass es Sinius gibt. Die Entwicklung effizienter Lösungen ermöglicht es, Ihre Zeit optimal zu nutzen. Sinius ist nicht nur kompakt und platzsparend, sondern bedeutet für Sie auch effektiven Zeitgewinn und mehr Behandlungsfreiraum. Dafür sorgen nicht zuletzt die intuitive Bedienung mit neuester Touchscreen-Technologie und zahlreiche integrierte Funktionen.



Mehr Behandlungsfreiraum durch reibungslose Abläufe

Die Sinus-Behandlungseinheit sorgt mit ihrem unkomplizierten Workflow für mehr Effizienz. Mit integrierbaren Therapiefunktionen, der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche EasyTouch und der optimalen Raumnutzung erlaubt Sinus praktische Arbeitsabläufe mit weniger Arbeitsschritten. Für Sie bedeutet das effektiven Zeitgewinn und mehr Behandlungsfreiraum.

Effizient

- Integrierbare Therapiekonzepte für Implantologie und Endodontie
- Integrierte Hygienefunktion
- Individuelle Preis-Leistungs-Verhältnisse

Intuitiv

- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche EasyTouch
- Auswahl zwischen drei Behandlungskonzepten, passend zu Ihrer persönlichen Arbeitsweise

Kompakt

- Optimale Raumnutzung
- Einzigartiges Stuhlhubsystem
- Flexibel positionierbares Arzt- und Assistenzelement

Sinius TS – das Schwebetischkonzept

- Ergonomische Positionierung durch unabhängig voneinander bewegbares Arztelement und Tray-System
- Funktionales Tray-System mit abnehmbarem und sehr flexibel positionierbarem Tray-Tablett
- Große Ablageflächen auf Arztelement und Tray-Tablett

Perfekt auf Ihre persönliche Arbeitsweise abgestimmt

Mit drei Behandlungskonzepten bietet Dentsply Sirona für jede Arbeitsweise die richtige Behandlungseinheit.

Sinius – das Verschiebepbahnkonzept

- Einzigartiges, ergonomisches Behandlungskonzept
- Manuell leicht vor- und zurückbewegbares Arztelement
- Optimale Greifwege durch Einschwenken des Arztelements



Sinius CS – das Schwingbügelkonzept

- Optimale Positionierung des Arztelements durch mögliche Drehung um bis zu 240 Grad
- Maximale Reichweite der Instrumente von 90 cm
- Ideal für unterschiedlichste Behandlungssituationen in Allein- oder Teambehandlung



Mehr Ergonomie für perfekte Resultate

Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Ergonomie ist die Basis des Ergonomie-Programms von Dentsply Sirona. Es zeichnet sich aus durch eine umfassende Sicht auf den Zusammenhang von Ergonomie und Workflow im Praxisalltag. Als Innovationstreiber im Bereich der Verbindung von digitalen Technologien mit Systemlösungen denken wir dieses Programm stets weiter.



1 Intuitives Sitzen

- **Mehr Bewegungsfreiheit**
Für jeden das richtige Behandlungskonzept. Die durchdachte Ergonomie unterstützt Sie dabei, Ihren Workflow auf höchstem Niveau zu gestalten.
- **Optimierte Greifwege**
Perfektes Zusammenspiel und flexible Positionierung von Arztelement und Tray, egal ob Alleinbehandler oder mit Assistenz
- **Intelligente Arbeitsstühle**
Hugo, Theo, Carl

2 Komfortables Lagern

- **Perfekte Einstellung der Behandlungseinheit**
Flexible Höhenverstellung und optimale Arbeitshöhe durch vertikale Mundpunkt-positionierung
- **Hoher Patientenkomfort**
Beste Unterstützung der Wirbelsäule mit ErgoMotion und Lordosefunktion. Perfekt auf Patientenbedürfnisse abgestimmt mit sanftem Hubantrieb, Klima-Premium-Polster, Lounge-Polster

3 Optimales Sehen

- **Beste Ausleuchtung**
Optimales Licht bei jeder Behandlung mit der LEDview Plus
- **Flexible Kopfstütze**
Motorische Kopfstütze für eine sanfte und automatische Positionierung oder Doppelgelenk-Kopfstütze für ergonomische und komfortable Lagerung des Patienten
- **Perfekte Intraoralaufnahmen**
Die Autofokuskamera SiroCam AF/AF+ optimiert die Visualisierung und Dokumentation der Behandlung

4 Integrierter Workflow

- **Integrierbare Tischgerätefunktionen**
Flexibilität in der Behandlung dank integrierter Implantologie und Endodontie mit ApexLocator-Anzeige auf Sivision-Monitor*
- **Intuitive Bedienung**
EasyTouch-Bedienoberfläche mit individualisierbarem Bedienkonzept für bis zu sechs Behandler
- **Moderne Ausstattung**
Innovative Instrumente, modernes Patientenkommunikationssystem Sivision, USB- und Ethernet-schnittstelle

Perfekte Ergebnisse


- Klinisch perfekt
- Ästhetisch perfekt
- Perfekt für Ihren Praxiserfolg

*Mit Sidexis 4 verfügbar



Effizient implantiert

Mit der integrierbaren Implantologiefunktion vereinfachen Sie Ihren Praxis-Workflow und bieten Ihren Patienten einen bequemeren Behandlungsablauf und viele Vorteile. Die integrierbare Implantologiefunktion wird übersichtlich auf dem Touchscreen angezeigt. Die Bedienung ist einfach, erfordert keine Vorkenntnisse und keinen zusätzlichen Fußschalter. Darüber hinaus sparen Sie Zeit, weil das Umrüsten entfällt und der Reinigungsaufwand verringert wird.

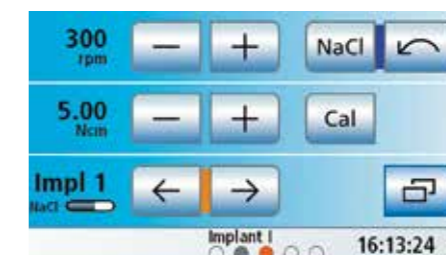

Integrierte Implantologie

Bei der integrierbaren Implantologiefunktion können Sie Drehzahl, Drehmoment und Durchflussmenge der sterilen Kühlflüssigkeit jeweils individuell auf Ihre gewohnten Arbeitsschritte einstellen.



Motor BL Implant

Der schlanke, leichte und kollektorlose Implantologiemotor leistet ein maximales Drehmoment von 5 Ncm ohne Luftaustritt an der Präparationsstelle und verfügt über interne Kühlung.



Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung

Die integrierte Kochsalzpumpe ist an den Fußschalter gekoppelt und vervollständigt Ihr System. Die benötigte Menge der sterilen Kühlflüssigkeit können Sie für jeden Implantologiestritt individuell einstellen.



Winkelstück Implant 20:1

Mit bis zu 70 Ncm bietet das Winkelstück Implant 20:1 die nötige Durchzugskraft für alle Fräs- und Bohrarbeiten. Für hochpräzise Ergebnisse in der Implantologie und Chirurgie.

Effizient bis an die Wurzel

Die neue, optimierte Endodontiefunktion garantiert Ihnen bessere Arbeitsabläufe und damit einen höheren Behandlungserfolg. Sie haben den gesamten Workflow perfekt im Blick und arbeiten absolut hygienisch, sicher und effizient.



Integrierbare Endodontie

Die integrierbare Endodontiefunktion macht Tischgeräte überflüssig und bietet neben der exakten Drehmomentsteuerung optional auch einen ApexLocator für höchste klinische Sicherheit.



Heliodent Plus-Gerätemodell

Schnell und sicher intraoral röntgen mit dem Heliodent Plus-Gerätemodell. Das langlebige Röntgengerät bietet Ihnen maximale Flexibilität bei bester Bildqualität.



ApexLocator-Anzeige am Monitor

Auch am Monitor können nun die Entfernung zum Wurzelkanalende und die ausgewählte Feile betrachtet werden.



Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht

Durch bessere Sicht während der Endodontiebehandlungen wird der Behandlungserfolg erhöht.


Erweiterung der reziproken Feilensysteme

Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona integrieren reziproke Feilensysteme von Dentsply Maillefer und VDW. So wird Ihnen die einfache und schnelle Verwendung der gängigen Feilensysteme ermöglicht. Die Feilenbibliothek lässt sich problemlos durch weitere Feilensysteme ergänzen.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Reciprocating Files

Reciproc®
One file endo

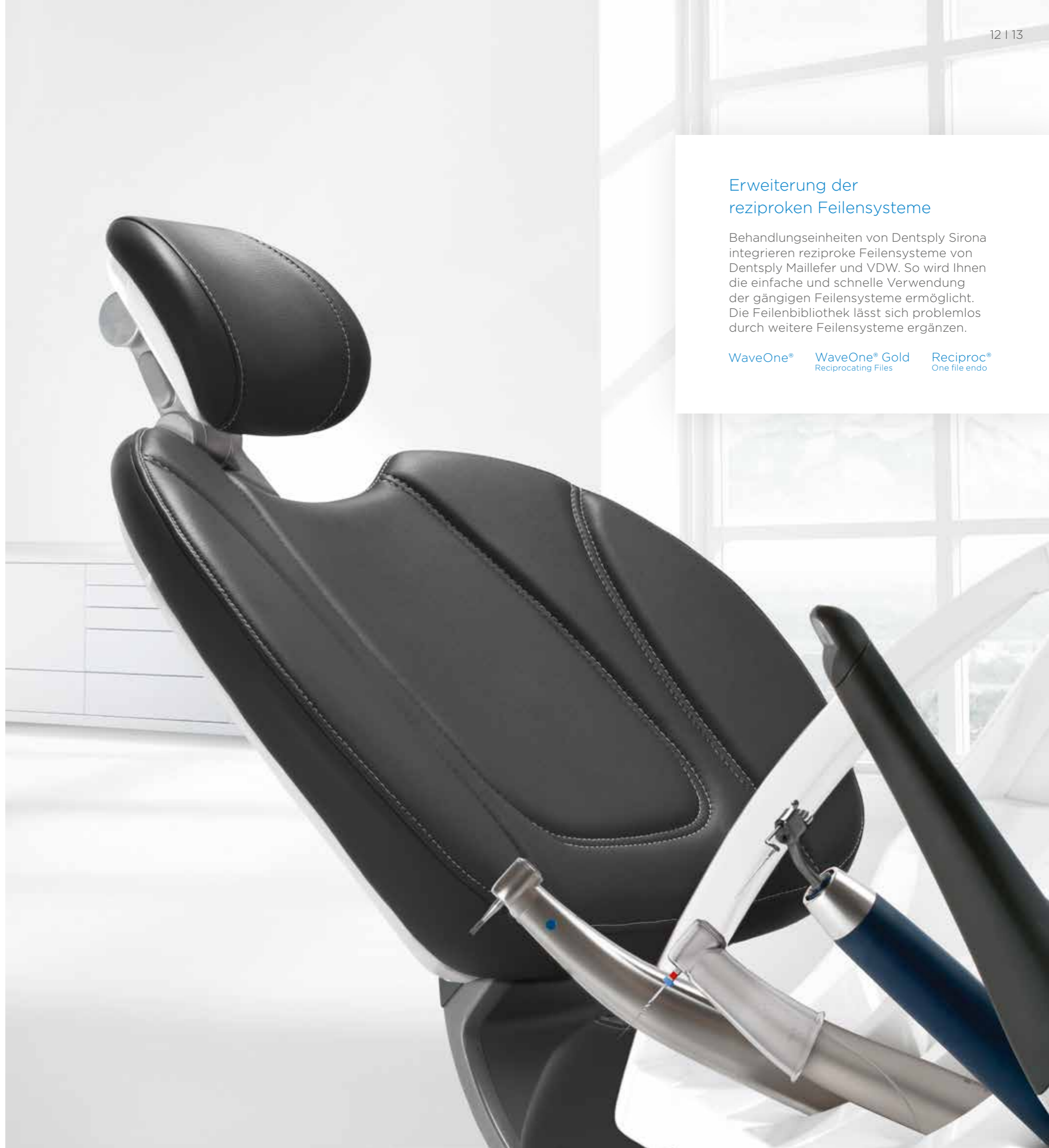

Effizient für Ihre Arbeitsweise

Sinius sorgt auch nach langen Arbeitstagen für ermüdungsfreies Behandeln und beste klinische Ergebnisse. Egal welche individuelle Haltung und Arbeitsweise Sie bevorzugen und welche physischen Voraussetzungen Sie oder Ihre Patienten mitbringen: Sinius sorgt für gesunde Bewegungsabläufe und hohen Komfort.



Motorische Kopfstütze

Bringt den Patientenkopf automatisch, sanft und ohne Kraftaufwand in die gewünschte Behandlungsposition.



Innovativer Funkfußschalter

Für uneingeschränkte Bewegungsabläufe dank freier Positionierbarkeit ohne Kabel.



Manuelle Verschiebebahn

Das Arztelement lässt sich ohne großen Aufwand manuell in die richtige Position bringen.



LEDview Plus

Mit optimaler Lichtstärke, Lichtfarbe und Lichtfeldgröße erzeugt LEDview Plus immer das richtige Licht und perfekte Sichtverhältnisse. Auch verfügbar als Deckenleuchte oder Deckenkombination mit Heliodent Plus.



Hugo

Der intelligente Arbeitsstuhl, der Sie intuitiv die richtige Körperhaltung einnehmen lässt.



Sidexis 4

Dank Sidexis 4 auf dem Sivation-Monitor können Sie Röntgenbilder, Intraoralaufnahmen und Planungsansichten direkt in der Behandlungssituation erklären.

Sinius ermöglicht optimierte Greifwege

Flexibel positionierbares Arzt- und Assistenzelement und vom Arztelement unabhängige Positionierung des Trays.




Perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Patienten abgestimmt

Durch umfassenden Komfort und neueste Multimedia-Technologie für die Beratung sorgen Sie mit Sinius bestens für Ihre Patienten. Besonders bei langen Behandlungen kommt der Patientenkomfort von Sinius zum Tragen. So bleiben Ihre Patienten entspannt und Sie können sich ganz auf die Behandlung konzentrieren. Mit der SiroCam AF/AF+ und dem 22"-Monitor erweitern Sie nicht nur Ihr eigenes Behandlersichtfeld, sondern erleichtern Ihren Patienten auch das Verständnis und die Entscheidung für eine Behandlung.



Lounge-Polster
Perfekter Liegekomfort durch weiches, angenehmes Oberflächenmaterial und bequeme Füllung. Konturierte Liegefläche für perfekten Halt.

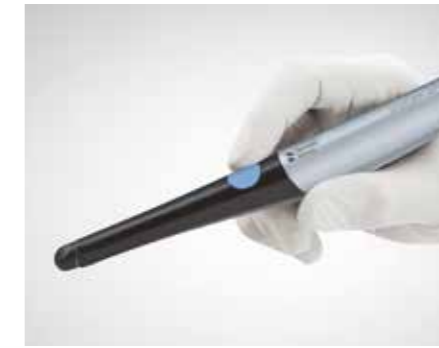

Modernste Ausstattung
Die Autofokuskamera SiroCam AF/AF+ verbindet beste Bildqualität mit einfacher Bedienung.



Klima-Premium-Polster
Reduziert die Stauwärme im Sitz- und Rückenbereich und sorgt durch diesen Kühleffekt für mehr Entspannung.



Maximale Absenkung
Sinius kann bis auf 36 cm abgesenkt werden, um älteren Patienten und Kindern den Einstieg zu erleichtern.



Multimedia-Beratung mit 22"-Monitor
Röntgenbilder, Intraoralaufnahmen und Planungsansichten steuern Sie ganz einfach über die EasyTouch-Bedienoberfläche an.



Lordosefunktion
Die Rückenlehne kann individuell an die Wirbelsäule jedes einzelnen Patienten angepasst werden.



Mehr Effizienz für Ihr Team

Höchste Hygienestandards erreichen Sie bei Sinius mit wenig Zeitaufwand. Denn von pflegeleichten, glatten Oberflächen über leicht abnehmbare Funktionsteile bis hin zum integrierten Sanieradapter ist alles auf maximale Keimreduzierung bei minimalem Zeitaufwand ausgelegt.



Integrierter Sanieradapter

Zum regelmäßigen Durchspülen der Wasserwege und für die monatliche Sanierung können Sie Ihre Instrumentenschläuche einfach in die integrierten Sanieradapter einführen und haben auf Knopfdruck die optimale Wasserqualität.



Effiziente Saugschlauchreinigung

Auch die Saugschläuche lassen sich automatisch reinigen – einfach und schnell.



Automatische Dosierung

Auf Wunsch kann die Saugschlauchreinigung zusätzlich mit automatischer Zudosierung von Chemikalien aus der Dentsply Sirona Pflege und Desinfektionsmittelliste erfolgen.



Abnehmbares Mundspülbecken

Das ein- und ausschwenkbare Mundspülbecken lässt sich für eine leichte Reinigung einfach abnehmen.



Thermodesinfizierbare Elemente

Sinius zeichnet sich durch glatte, leicht zu reinigende Oberflächen aus. Alle hygienekritischen Elemente sind abnehmbar und können sterilisiert bzw. thermodesinfiziert werden.



Die DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene) bestätigt Dentsply Sirona die Einhaltung höchster hygienischer Sicherheitsstandards gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Weitere Informationen: www.krankenhaushygiene.de

Form und Farbe

Für die einzigartige Atmosphäre in Ihrer Praxis bietet Sinius das perfekte Zusammenspiel von Form und Farbe. Das macht ihn zum absoluten Blickfang. Ob klassisch oder modern – Sinius fügt sich elegant in Ihre Praxisumgebung ein. Das unterstreichen auch Designauszeichnungen wie der iF product design award Gold oder die Nominierung zum Deutschen Designpreis.

Polsterfarben

Die elegante Welt

Carbon* Merlot* Platin Pazifik* Klassische, zeitlose Kombinationen für einen edlen Look.

Die natürliche Welt

Umbra* Saphir Basalt* Cherry Sanfte, warme Farbtöne für ein beruhigendes Behandlungsklima.

Die vitale Welt

Aloe Aqua Flamingo Orchidee* Farbenfrohe, frische Töne für eine moderne, lebendige Atmosphäre.

* Polsterfarben auch als Lounge Polster erhältlich.

Nahtfarben



Standard Rot Dunkelgrau Hellblau Rosa

Lackfarben

Rosé Platinsilber Mattgold Neutralweiß

Kompromisslos hochwertig



Klima-Premiumpolster

Die Stauwärme in Sitz- und Rückenbereich wird reduziert. Dieser Kühleffekt fördert die Entspannung des Patienten.

Lounge-Polster

Durch das innovative Material ist das Polster besonders weich und bequem – für das Extra an Komfort.

Individuelle Konfiguration

Sie können Ihre Behandlungseinheit wunschgenau zusammenstellen und später systematisch erweitern. So zahlen Sie nur das, was Sie brauchen.



Weitere Infos unter: dentsplysirona.com/1plus1-vorteil oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Basisgerät

Sinius Mit Verschiebebahn



Sinius CS Mit Schwingbügeln



Sinius TS Mit Schwebetisch



Anwenderpaket

Advance

- Sprayvit M im Arztelement
- 1 Motor BL oder BL ISO C
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Funkfußschalter

Innovation

- Sprayvit M im Arzt- und Assistenzelement
- 2x Motor BL oder BL ISO C
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Funkfußschalter

Funktionale Ergänzung der Grundausstattung, Pakete nicht kombinierbar.

Optionspakete

Endo

- Endodontiefunktion inkl. Funktion reziproke Feilensysteme
- ApexLocator
- Halterung für ApexLocator
- Winkelstück T1 Line Endo 6L mit Licht
- ISO-Adapter mit Licht in Verbindung mit Motor BL

Implant

- Implantologiefunktion
- Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung
- Elektromotor BL Implant
- Winkelstück Implant 20:1

Comfort

- 1. Arbeitsstuhl (Variante frei wählbar)
- 2. Arbeitsstuhl zum Paketpreis
- Motorische Kopfstütze
- Lordosefunktion
- Klima-Premium-Polster
- Optional mit Lounge-Polster erhältlich (statt Klima-Premium-Polster)

Sivision

- 22"-Monitor
- Monitorposition frei wählbar
- SiroCam AF (Aufpreis für SiroCam AF+)
- Kameravorbereitung im Arztelement

Alle Optionspakete sind frei miteinander kombinierbar.

Dentsply Sirona für Sie

Wir unterstützen Zahnärzte dabei, eine bessere, sichere und schnellere zahnmedizinische Versorgung anzubieten. Denn wer täglich Höchstleistungen erbringt, erwartet das auch von seinem Equipment. Deswegen stellen wir innovative Lösungen bereit, die zur Verbesserung der Zahngesundheit beitragen. Das bedeutet für Sie, dass Sie mit Dentsply Sirona stets auf dem höchstem Standard arbeiten. Darauf können Sie sich verlassen – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.

Innovationen zum Anfassen



Als globaler Innovationsführer für dentale Ausrüstungsgüter investieren wir permanent in die Forschung und damit in die Zukunft der modernen Zahnheilkunde. Durch die Vernetzung digitaler Technologien zu integrierten Gesamtlösungen und die Optimierung des Behandlungsflows schaffen wir bessere Ergebnisse, mehr Komfort und Sicherheit für den Patienten sowie Zeit- und Kostenersparnis im Praxisalltag.

Was das für Sinus bedeutet?

Qualität made in Germany

Entwurf, Fertigung und Prüfung der Behandlungseinheit finden im Dentsply Sirona-Werk in Bensheim statt. Die sorgfältige Montage dort begründet den hohen Anspruch an Sinus und garantiert Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts auf lange Sicht.

Zukunftsweisend innovativ

Sinus entwickelt sich ständig weiter: Die Behandlungseinheit ist upgradefähig und besitzt eine USB-Schnittstelle zur Integration neuer Funktionen sowie eine Ethernetschnittstelle zur leichten Fehleranalyse.

Hochwertige Verarbeitung

Für Sinus werden nur die besten Materialien verarbeitet. Gerüst, Stuhl- und Rückenlehnensträger bestehen aus einer durchdachten Kombination von Stahl und Aluminium. Das macht Sinus leicht und zugleich solide.



Rundum-Sorglos-Schutz

Bei jedem Neukauf einer Dentsply Sirona Behandlungseinheit können Sie eine kostenlose Garantie auf 2 Jahre bzw. eine kostenpflichtige Garantie auf 5 Jahre erhalten. Beide Garantievarianten setzen die regelmäßige jährliche Wartung der entsprechenden Behandlungseinheit voraus.

Registrieren Sie Ihre neue Behandlungseinheit innerhalb der ersten 3 Monate nach Installation unter dentsplysirona.com/treatment-centers/garantie und profitieren Sie von unseren Garantievorteilen.



2 Jahre Garantie¹

beinhaltet u.a.:

- 2 Jahre Rundum-Sorglos-Schutz
- Dentsply Sirona Teilegarantie² auf Ersatzteile (außer Ausschlussteile)
- Kostenlose Garantie



5 Jahre Garantie¹

beinhaltet u.a.:

- 5 Jahre Rundum-Sorglos-Schutz
- Im 4. Garantiejahr 1 kostenloser Polstersatz³ für Ihre Behandlungseinheit und den dazugehörigen Arbeitsstuhl³
- Dentsply Sirona Teilegarantie² auf Ersatzteile (außer Ausschlussteile)
- Vorteilspreis: EUR 3.500,-

¹ Es gelten die Garantiebedingungen für Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona, abrufbar unter: dentsplysirona.com/treatment-centers/garantie.

² Unter anderem sind Anfahrts- und Techniker-Stundenkosten nicht enthalten. Ausschlussteile entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen.

³ Der kostenlose Polstersatz ist in der 5-Jahres-Garantie enthalten und kann im 4. Garantiejahr über Ihren Fachhändler abgerufen werden. Der kostenlose Polstersatz entspricht in Art und Ausführung dem ursprünglichen Lieferumfang inkl. Arbeitsstühle. Die Auswahl des Polstersatzes kann nur aus dem zum Zeitpunkt des Abrufs gültigen Sortiment ausgewählt werden.

Alle Preise zzgl. MwSt.

Ihre Einzeloptionen

Hier finden Sie die komplette Liste aller Einzeloptionen und Sie sehen, welche Ausstattung zu den Basisgeräten gehört.

Basisgerät Ausstattungsoptionen

VB CS TS

Optionen Stuhl			
Doppelgelenk-Kopfstütze	■	■	■
Motorische Kopfstütze	□	□	□
Premium-Polster	■	■	■
Klima-Premium-Polster	□	□	□
Lounge Polster, auf Wunsch mit farbiger Ziernaht	□	□	□
Lordosefunktion	□	□	□
Armlehne, rechts oder links schwenkbar	□	□	□
Kreuzfußschalter	■	■	■
Fußschalter, Kabelversion	■	■	■
Funkfußschalter	□	□	□
Fremdgeräteanschluss	□	□	□
Sitzaufgabe für kleine Patienten (Sitzkissen C)	□	□	□
Montageplatte zum Ausgleich unebener Böden	□	□	□

Optionen Arztelement

(5 Positionen, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)

Spritze Sprayvit M mit Licht	□	□	□
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■	■	■
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■	■	■
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	□	□	□
Elektromotor BL	□	□	□
Elektromotor BL ISO C	□	□	□
Elektromotor BL Implant	□	□	□
Winkelstück Implant 20:1	□	□	□
Turbinenschlauch	□	□	□
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	□	□	□
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	■	■	■
Implantologiefunktion	□	□	□
Pumpe für Kochsalzlösung	□	□	□
Endodontiefunktion inkl. Funktion reziproke Feilensysteme	□	□	□
Winkelstück T1 Line Endo 6L	□	□	□
Funktion ApexLocator mit Anzeige auf Sivation-Monitor	□	□	□
Schwenkbarer Tray-Halter für 1 oder 2 Normtrays		□	□
Panorama-Röntgenbildbetrachter			□

Optionen Assistenzelement

(4 Positionen, abnehmbare Ablage und Silikonmatte)

Polylicht Satelec mini L.E.D.	□	□	□
Chirurgische Absaugung	□	□	□
2. großer Sauger	□	□	□
Spritze Sprayvit M mit Licht	□	□	□
Absaugvorrichtung	■	■	■
Speichelzieher	■	■	■

Basisgerät Ausstattungsoptionen

VB CS TS

Optionen Wassereinheit			
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion sowie Purge und Autopurge	■	■	■
Saugschlauchreinigung, chemisch	■	■	■
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	■	■	■
Separierautomatik	□	□	□
Amalgamabscheider	□	□	□
Mundspülbecken, schwenkbar	■	■	■
Ohne Mundspülbecken	□	□	□
Tray mit anklippbarem Tablett und Griff	□		

Optionen Sivation digital

SiroCam AF	□	□	□
SiroCam AF+	□	□	□
Monitor, 22", am Tray inkl. Tray	□		
Monitor, 22", an der Leuchtaufbaustange	□	□	□
Zusatzablage für Kamera	□	□	□
Kameraversorgung im Arztelement	□	□	□
Kameraversorgung im Assistenzelement		□	□
Einbausatz Sivation ready mit USB-Schnittstelle	□	□	□
Kabelsatz PC-Anbindung	□	□	□

Arbeitsstuhl Hugo

(lange oder kurze Gasfeder wählbar)

Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	□	□	□
Hugo Manual (mit Handauslösung)	□	□	□
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□	□	□

Arbeitsstuhl Carl

(lange oder kurze Gasfeder wählbar)

Carl Manual (mit Handauslösung)	□	□	□
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□	□	□

Arbeitsstuhl Theo

(lange oder kurze Gasfeder wählbar)

Sattelstuhl Theo	□	□	□

Behandlungsleuchte

Behandlungsleuchte LEDview Plus (3 Gelenkachsen, mit Sensor)	□	□	□
Deckenleuchte LEDview Plus	□	□	□
Adapter für Heliodont Plus Deckenkombination	□	□	□
Adapter für Heliodont Plus Gerätemodell	□	□	□

VB Sinus (Verschiebebahrversion)
 CS Sinus CS (Schwingbügelversion)
 TS Sinus TS (Schwebetischversion)
 ■ Im Basisgerät enthalten
 □ Optional



Ihre Individuelle Preisauskunft



Wählen Sie aus den Ausstattungsoptionen und nutzen Sie die Vorteilspakete für Ihre individuellen Anforderungen!

Mit den neuen interaktiven PDF-Preisinfo-Formularen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit nur wenigen Mausklicks eine schnelle, einfache und individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Preisauskunft zu erhalten.

- Fokussierte Preisinformation
- Flexible und individuelle Auswahlmöglichkeiten
- Smarte Anwendung mit sofortiger Preisberechnung (Listenpreise exkl. MwSt.)

In wenigen Schritten zur Ihrer individuellen Preisinformation



Schritt 1: Download

Laden Sie die PDF-Broschüre herunter und speichern Sie diese lokal auf Ihrem Computer oder kopieren Sie diese in die Expert 7 App auf Ihrem iPad.

Schritt 2: PDF-Öffnen

Öffnen Sie die PDF-Broschüre ausschließlich mit dem Adobe Reader oder mit der PDF Expert 7 App auf Ihrem iPad.

Schritt 3: Preisinfo

Wählen Sie Ihre individuelle Ausstattung. Sie erhalten sofort und auf einen Blick die Preisinformation zu Ihrer Wunsch-ausstattung.

Schritt 4: Beratung

Fragen Sie Ihren Einrichtungsberater nach einem individuellen Angebot.

Hinweis

Interaktive PDF-Broschüre unter Windows oder macOS öffnen:

Bitte die neueste Version des kostenlosen Adobe Acrobat Readers verwenden und die PDF-Broschüre auf Ihrem Computer speichern. Kostenloser Download: [Adobe Acrobat Reader](#)

Wenn die PDF-Broschüre mit einem Internetbrowser geöffnet wird, verliert das Preisinfo-Formular seine Funktionalität. Eine aktive JavaScript-Unterstützung (Standardeinstellung) wird vorausgesetzt.

Interaktive PDF-Broschüre auf dem iPad öffnen:


Mit der PDF Expert 7 App können Sie das PDF-Formular auf Ihrem iPad öffnen. PDF Expert 7 aus dem App Store herunterladen.

Für Sinus TS und Sinus CS sind die Preisinfo-Formulare auf unserer Internetseite verfügbar: dentsplysirona.com/sinius-preisinfo

Sinius

mit manueller
Verschiebebahn

Wählen Sie Ihre Ausstattung

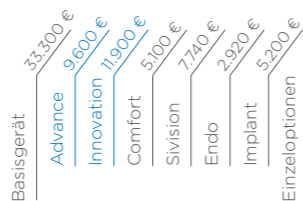

	EUR ohne MwSt.
Patientenstuhl	
Premium-Polster	
Klima-Premium-Polster	
Lounge Polster ¹	
Akzentfarbe	
Doppelgelenk-Kopfstütze	
Motorische Kopfstütze	
Lordosefunktion	
ArMLEHNE	
Kreuzfußschalter	
Fußschalter, Kabelversion	
Funkfußschalter ²	
Arztelement	
Spritze Sprayvit M mit Licht	
Turbinenversorgung	
1. Elektromotor	
2. Elektromotor	
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	
Implantologiefunktion	
Elektromotor BL Implant	
Winkelstück Implant 20:1	
Pumpe für Kochsalzlösung	
Endo-Funktion inkl. reziproke Feilensysteme	
Winkelstück T1 Line Endo 6 L	
ApexLocator	
Assistenzelement	
Polylicht Satelec Mini LED	
Spritze Sprayvit M mit Licht	
Absaugvorrichtung - großer Sauger	
Speichelzieher - kleiner Sauger	
Chirurgische Absaugvorrichtung	
Wassereinheit	
Desinfektionsanlage mit DVGW Zulassung	
Integrierte Sanieradapter	
Saugschlauchreinigung, chemisch	
Nassabsaugung	
Amalgamabscheider	
Mundspülbecken, schwenkbar	
Patientenkommunikation „Sivision“	
SiroCam AF	
Mehrpreis SiroCam AF+ ³	
Monitor, 22"	
Monitoradaption	
Kameraversorgung im Arztelement	
Sivision ready mit USB-Schnittstelle	
Kabelsatz PC-Anbindung	
Zusatzausstattung	
LEDview Plus Gerätemodell	
Mehrpreis LEDview Plus Deckenmodell ⁴	
Heliodent Plus	
Tray am höhenverstellbarem Tragarm	
1. Arbeitsstuhl	
2. Arbeitsstuhl ⁵	
Fremdgeräteanschluss	
Montageplatte zum Ausgleich unebener Böden	

Ihre Preisübersicht

Ihre gewählten Optionen	EUR ohne MwSt.
Basisgerät	
Vorteilspakete	
Advance	
Innovation	
Comfort	
Sivision	
Endo	
Implant	
Patientenstuhl	
Mehrpreis Lounge Polster ¹	
Akzentfarbe	
Motorische Kopfstütze	
ArMLEHNE	
Arztelement	
Turbinenversorgung	
Assistenzelement	
Polylicht Satelec Mini LED	
Spritze Sprayvit M mit Licht	
Chirurgische Absaugvorrichtung	
Wassereinheit	
Amalgamabscheider	
Patientenkommunikation „Sivision“	
Mehrpreis SiroCam AF+ ³	
Sivision Ready mit USB-Schnittstelle	
Kabelsatz PC-Anbindung	
Zusatzausstattungen	
Mehrpreis LEDview Plus Deckenmodell ⁴	
Heliodent Plus	
Tray am höhenverstellbarem Tragarm	
1. Arbeitsstuhl	
2. Arbeitsstuhl ⁵	
Fremdgeräteanschluss	
Montageplatte zum Ausgleich Boden	
Gesamtpreis	
Aktionsvorteil*	
Basisgerät + 1 VP nach Wahl ⁶	
Basisgerät + 1 VP Sivision + 1 VP nach Wahl ⁶	
Aktionspreis	

Meine Notizen:

Dentsply Sirona Aktionsvorteile: dentsplysirona.com/aktionsvorteile
 Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. gesetzliche MwSt.
 Dentsply Sirona Preisstand 10/2020. Abbildungen sind Beispiele und können mehrpreispflichtige Ausstattungen enthalten. Fragen Sie Ihren Dentsply Sirona Fachhändler (Equipment) nach einem individuellen Angebot.
 *Dentsply Sirona Listenpreis-Vorteile zzgl. MwSt. gültig bis 30.06.2021 in Deutschland und Österreich.

¹ Anstelle von Klima-Premium Polster oder Premium Polster
² Anstelle des Fußschalters, Kabelversion
³ In Verbindung mit dem Vorteilspaket Sivision und anstelle von SiroCam AF
⁴ Anstelle des LEDview Plus Gerätemodells
⁵ Vortilspreis in Verbindung mit dem Vorteilspaket Comfort
⁶ VP zur Wahl: Innovation/Comfort/Sivision/Endo/Implant

■ Im Basisgerät enthalten
 □ Wählbare Vorteilspakete oder Optionen
 ☑ Gewählte Vorteilspakete oder Optionen
 ☒ Gewählte Ausstattung
 - Durch Ausstattungsoption ersetzt
 ⓘ Information

Ausstattungsmerkmale



Sinius mit manueller Verschiebebahn



Premium-Polster (Klima)




Lounge-Polster



Funkfußschalter




Motorische Kopfstütze

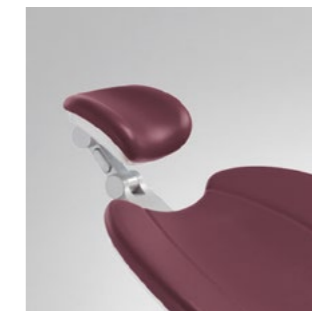

Doppelgelenk-Kopfstütze



Armlehnen

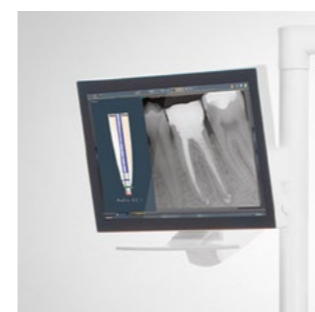

Monitor, 22", an der Leuchtaufbaustange



Monitor, 22", am Tray



Tray am höhenverstellbarem Tragarm




SiroCam (AF/AF+)



LEDview Plus Gerätemodell



Heliodent Plus Gerätemodell

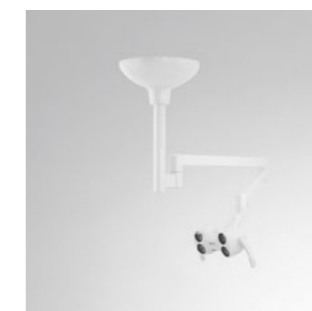


LEDview Plus Deckenmodell



Deckenkombination mit Heliodent Plus



Fremdgeräteanschluss

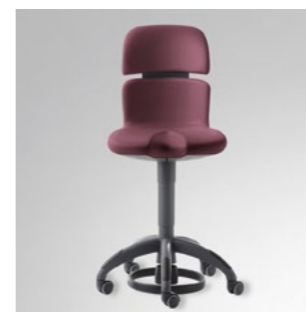

Hugo (Freehand)



Carl (Manual Plus)



Theo

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments